

# Aero2Go kieszonkowa komora inhalacyjna

Cena: 125,90 pln



## Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Nebulizator kieszonkowy Aero2Go (AeroChamber2Go) to wygodny w użytkowaniu wyrób o niewielkich rozmiarach łączący w sobie komorę i inhalator.

Komora jest jednocześnie etui mogącym służyć do przechowywania inhalatora wewnątrz dzięki czemu wystarczy mieć przy sobie 1 przedmiot a nie 2. Ponadto zabezpiecza inhalator i utrzymuje go w czystości.

### Właściwości:

- odpowiedni do stosowania poza domem
- jest łatwy w użyciu, w celu przyjęcia leku wystarczy normalnie oddychać
- dzięki zaworowi inhalacyjnemu lek jest utrzymywany w zawieszeniu do momentu kiedy jest gotowy do inhalacji
- unikalny system otwierania zapewnia szybki dostęp do inhalatora
- posiada zatyczkę zabezpieczającą przed przypadkowym otwarciem
- komora chroni inhalator, utrzymuje go w czystości i zabezpiecza
- produkt wykonany z odpornego na uderzenia materiału antystatycznego
- może być używany bezpośrednio po wyjęciu opakowania
- pasuje do większości przepisywanych inhalatorów (NIE pasuje do inhalatorów okrągłych Airomir, Qvar, Alvesco)

### Produkt odpowiedni do stosowania przez:

- aktywne osoby dorosłe z przewlekłą astmą (18-64 lata)
- osoby, u których niedawno rozpoznano POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
- nastolatki z przewlekłą astmą

### Użycie i czyszczenie:

Wstrząsnąć inhalatorem bezpośrednio przed użyciem i zdjąć zatyczkę. Włożyć inhalator do tylnej części komory. Nacisnąć inhalator w momencie rozpoczęcia powolnego i głębokiego wdechu.

Podczas przechowywania inhalatora w komorze, należy zdjąć z niego zatyczkę. Komorę należy czyścić co tydzień. Można myć w zmywarce.