

APTEO Test ciążowy HCG płytkowy do użytku domowego

Cena: 7,20 pln



Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

APTEO Test ciążowy HCG płytkowy szybki w użyciu i dokładny test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Dokładność testu odpowiada testowi laboratoryjnemu, czułość testu wynosi 10mIU/ml.

Wykonanie badania testem ciążowym HCG jest proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 5 minut.

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone. Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

- Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.
- Tuż przed wykonaniem badania otworzyć saszetkę z testem, środek pochłaniający wilgoć można wyrzucić.
- Płytke testową umieścić na poziomej powierzchni.
- Końcówkę pipetki zanurzyć w badanym moczu i ściskając ją nabrać próbkę moczu.
- Odmierzyć próbkę moczu i umieścić ją na płytce testowej.
- Obserwować ruch kapilarny, który przesuwają próbkę wzdłuż membrany. Kiedy obecna w moczu hCG osiągnie poziom testowej membrany, pojawi się barwna linia, jej brak to wynik negatywny.
- Wynik testu odczytać można po 5 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka na płytce testowej.

Zawartość opakowania:

- saszetka z 1 płytką testową i środkiem pochłaniającym wilgoć
- 1 pojemnik na mocz
- 1 pipetka
- instrukcja użytkowania

Jak interpretować wynik testu:

Wynik pozytywny (ciąża)

Na teście w obszarze testowym i kontrolnym pojawiają się 2 linie jednakowego koloru. Intensywność koloru linii może się różnić, co wynika z różnego stężenia hormonu hCG na poszczególnych etapach ciąży. W celu potwierdzenia wyniku i ciąży należy udać się do lekarza.

Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się tylko jedna linia - linia kontrolna, nie pojawia się linia testowa.

Wynik niejednoznaczny

W przypadku, gdy nie pojawia się żadna linia, obie są słabo widoczne lub pojawia się tylko linia w obszarze testowym wynik jest niejednoznaczny i badanie trzeba powtórzyć z użyciem nowego testu.

