

# APTEO Test ciążowy HCG strumieniowy do użytku domowego



Cena: 8,40 pln

## Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

APTEO Test ciążowy hCG szybki w użyciu test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Czułość testu wynosi 10mIU/ml, dokładność odpowiada testowi laboratoryjnemu.

Test pozwala na wykrycie ciąży już od 5 do 7 dnia po zapłodnieniu.

Wykonanie badania testem ciążowym hCG jest proste, a wynik uzyskuje się już po 5 minutach.

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone. Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

### Jak wykonać badanie:

Badanie można przeprowadzić na dwa sposoby:

#### Sposób 1.:

- Wyjąć płytkę testową z foliowej saszetki (po otwarciu saszetki z testem należy go natychmiast wykonać, narażenie płytki na wilgoć i

temperaturę otoczenia może wpłynąć na pogorszenie jakości testu), środek pochłaniający wilgoć wyrzucić do kosza

- Zdjąć z testu nasadkę ochronną
- Test kierować końcówką do dołu i trzymać pod strumieniem moczu przez 10 sekund.
- Nałożyć nasadkę na test, odłożyć go, czekać aż pojawią się linie.
- Po 5 minutach od pobrania próbki odczytać wynik testu.

#### Sposób 2.:

Badanie przeprowadzić używając do tego próbki moczu zebranej do czystego i suchego pojemnika. W celu badania należy końcówkę testu (po zdjęciu nasadki) zanurzyć w pojemniku z moczem i moczyć go przez 20 sekund. Po tym czasie nałożyć nasadkę, odłożyć test i czekać na wynik.

Po wykonaniu testu i otrzymaniu wyniku, wyrzucić go - zużyty test traktować należy jako materiał zakaźny, trzeba więc zachować odpowiednie środki ostrożności.

#### Jak interpretować wynik testu:

##### Wynik pozytywny (ciąża)

Na teście w obszarze testowym i kontrolnym pojawiają się 2 linie jednakowego koloru. Intensywność koloru linii może się różnić, co wynika z różnego stężenia hormonu hCG na poszczególnych etapach ciąży. W celu potwierdzenia wyniku i ciąży należy udać się do lekarza.

##### Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się tylko jedna linia - linia kontrolna, nie pojawia się linia testowa.

##### Wynik niejednoznaczny

W przypadku, gdy nie pojawia się żadna linia, obie są słabo widoczne lub pojawia się tylko linia w obszarze testowym wynik jest niejednoznaczny i badanie trzeba powtórzyć z użyciem nowego testu.

#### Zawartość opakowania:

- saszetka z 1 płytką testową i środkiem pochłaniającym wilgoć
- instrukcja użytkowania

