

# BBraun Askina Barrier Film barierowy spray ochronny 28g - 4002801



Cena: 68,50 pln

## Opis słownikowy

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producent   | BBraun         |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

## Opis produktu

Przepuszczający powietrze, szybko schnący preparat polimerowy przeznaczony do stosowania jako bariera ochronna skóry wykazujący działanie pielęgnujące.

Produkt przeznaczony do stosowania na zdrową lub uszkodzoną skórę jako bariera ochronna, może być stosowany także na skórę delikatną i wrażliwą oraz u niemowląt powyżej 3 miesiąca życia.

### Zastosowanie:

- na małe rany i otarcia skóry
- pod opatrunki, w celu zabezpieczenia skóry przed uszkodzeniem w wyniku zdejmowania opatrunku
- jako zabezpieczenie skóry wokół ran i stomii
- na miejsca zamocowania cewników i drenów
- jako ochrona przed drażniącym działaniem wydaliny i wydzielin pacjenta, np. przy inkontynencji
- w celu ochrony przed otarciem miejsc wrażliwych, np. pięt, łokci, palców stóp i bioder

### Właściwości:

- nie wysusza skóry
- przepuszcza powietrze i umożliwia oddychanie skóry
- szybko wysycha - poniżej 30 sekund
- wysoce wydajny - 1 opakowanie wystarcza na ok 140 aplikacji
- bariera ochronna utrzymuje się przez 48-72h
- przezroczysty, umożliwiający kontrolę wizualną skóry
- nie ogranicza wchłaniałości stosowanych przy inkontynencji wyrobów chłonnych
- poprawia przyleganie plastrów mocujących i opatrunków

- łatwy do usunięcia

**Sposób użycia:**

Umyć skórę z użyciem odpowiedniego preparatu i delikatnie osuszyć.

Spryskać skórę z odległości 10 - 15 cm nakładając polimerową warstwę ochronną.

Przed nałożeniem sprzętu stomijnego/opatrunku odczekać ok. 30 sekund do wyschnięcia.

W razie konieczności produkt można usunąć za pomocą medycznych zmywaczy do skóry lub delikatnej emulsji myjącej.

**Opakowanie:** 28g