

CEREDERM® Samoprzylepny opatrunek silikonowy na blizny Lipostick 3,5cm - 3340-437 - 6szt.

Cena: 37,80 pln



Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	5 szt.
Opakowanie	6 szt.
Producent	CERECARE
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Przezroczyste i łatwe w użyciu samoprzylepne opatrunki silikonowe CEREDERM® w kształcie okręgów o średnicy 35mm przeznaczone do stosowania w leczeniu i profilaktyce blizn przerostowych (wypukłych, o czerwonym zabarwieniu) i keloidów (grubych, twardych, włóknistych narośli).

Dzięki niewielkiemu kształtowi opatrunki mogą być z powodzeniem stosowane na mniejsze blizny. Są one zwłaszcza polecane w przypadku blizn bo liposukcji lub innych zabiegach, które nie wymagają dużych cięć chirurgicznych.

Działanie mechaniczne samoprzylepnego opatrunku wpływa na wygładzenie blizny i jej spłaszczenie oraz ograniczenie jej rozwoju. Stosowanie opatrunku CEREDERM® dzięki półokluzyjnemu działaniu poprawia ogólny wygląd blizny, zmniejsza jej widoczność, zaczerwienienie oraz dodatkowo wpływa na jej zmiękczenie.

Wszystkie składniki opatrunków CEREDERM® zostały starannie dobrane pod kątem ich biokompatybilności.

Rezultaty stosowania widoczne są po 2-3 miesiącach stosowania.

Właściwości:

- Możliwość cięcia i dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Elastyczny, umożliwia precyzyjne dopasowanie do kształtu blizny.
- Może być stosowany samodzielnie, bez dodatku kremu.
- Samoprzylepny dla bezpiecznego dopasowania.
- Przezroczysty, cienki i dyskretny.
- Może być noszony do 3 dni, przez 24 godziny na dobę.
- Widocznie zredukowane blizny: bardziej elastyczne, płaskie i mniej zaczerwienione.
- Widoczne rezultaty po 2-3 miesiącach stosowania

Sposób użycia:

Przed użyciem dokładnie oczyścić i osuszyć bliznę.

Wyjąć opatrunek z opakowania. Opatrunek można przyciąć do pożądanej wielkości, tak by przykryć bliznę i jej najbliższą okolicę.

Zdjąć z opatrunku zieloną osłonę zachowując ostrożność tak żeby opatrunek pozostał gładki i bez najmniejszych zagięć.

Umieścić opatrunek przylepną stroną do blizny.

Opatrunek stosuje się bez kremu. Można na niego założyć dodatkowe zabezpieczenia utrzymujące np. opaska elastyczna.

Średnica: 3,5 cm

Opakowanie: 6 szt. (1 blister)