

Dr Herbich - Pessar pierścieniowy gruby - jałowy



Cena od: 159,90 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-----------------|
| Producent | Herbich Michael |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Pessar pierścieniowy stosowany jest przy obniżeniu pochwy i macicy. Zakładany jest też przy niezbyt nasilonych objawach wysiłkowego nietrzymania moczu oraz wg odkrycia Dr Herbicha w poporodowych zespołach bólowych miednicy mniejszej. Bardzo często zespół bólowy miednicy mniejszej jest błędnie rozpoznawany i leczony jako przewlekłe zapalenie przydatków (towarzyszy temu brak odchyleń w wynikach laboratoryjnych), zapalenie wyrostka robaczkowego lub jest interpretowany jako rwa kulszowa lub nieokreślone bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rozpoznać ten zespół można w następujący sposób: Wywiad - bóle w trakcie stosunków, bóle w podbrzuszu przy obciążeniu. Klinicznie - nie zawsze znacznego stopnia obniżenie narządów rodnych. W badaniu ginekologicznym - po uciśnięciu tarczy części pochwowej szyjki macicy pacjentka odczuwa "ten ból". Po założeniu pessara pierścieniowego grubego, (który nie może być ani za duży ani za mały) dochodzi do ustabilizowania narządu rodnego i dolegliwości całkowicie ustępują lub ulegają znacznemu zmniejszeniu. Przy nasilonych objawach, gdy wszystkie metody zachowawcze zawodzą, usunięcie macicy (najlepiej przez pochwę) uwalnia pacjentkę od dolegliwości.

Pessar pierścieniowy gruby (z doświadczenia dr Herbicha) można stosować po odpowiednim dobraniu u pacjentek gdzie po porodzie doszło do znacznego obniżenia pochwy i macicy z / bez objawów zespołu bólowego. Dodatkowo pacjentka powinna wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie miednicy małej.

Uwaga: Pessar może być stosowany tylko przez jedną pacjentkę!

Pessar co 4 tygodnie wyjąć w celu sprawdzenia ścian pochwy, a następnie po wymyciu założyć u tej samej pacjentki wg uznania lekarza prowadzącego w sposób gwarantujący zasady higieny.

Wymiary: średnica od 50 do 100 mm (co 5 mm)