

Help4Skin Brodawki i kurzajki - usuwanie brodawek i kurzajek, 50ml



Cena: 57,50 pln

Opis słownikowy

Pojemność	50ml
Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Preparat do usuwania kurzajek i brodawek z wykorzystaniem krioterapii (opatentowaną metodą VERUKILL), pozwalającej na wymrożenie niepożądanych zmian do korzenia.

Działanie produktu widoczne jest już po 1 użyciu.

Aktywacja Help4Skin jest łatwa i szybka, trwa zaledwie 1 sekundę.

produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, co zapewniają jednorazowe aplikatory, eliminujące ryzyko przenoszenia wirusa.

Help4Skin jest wyrobem medycznym.

Wskazania:

Preparat Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci (powyżej 4 roku życia). Wyrobu wystarcza na wykonanie 12 aplikacji.

Działanie:

Preparat Help4Skin w bezpieczny i sposób pozwala całkowicie wymrozić brodawki i kurzajki w domowych warunkach. Zabieg trwa

krotko a zamrożona brodawka stopniowo zanika lub odpada po 10 dniach od zaaplikowania produktu, po odpadnięciu zmiany w jej miejscu pozostaje nowy naskórek.

W trakcie zabiegu metodą krioterapii VERRUKILL miejsce które będzie miało kontakt z preparatem stanie się białe i może pojawić się niewielkie uczucie bólu i pieczenia, co jest normalne.

W przypadku zwykłych brodawek i kurzajek, na ich usunięcie wystarcza zazwyczaj jeden zabieg, jeśli jednak nie nastąpi poprawa, można go powtórzyć. (po 2 tygodniach od wykonania pierwszego zabiegu). Jeśli po 4 próbie brodawka lub kurzajka nie zniknie należy zgłosić się do lekarza.

Gdy zabieg ma być przeprowadzony na skupisku brodawek, zaleca się robić go na każdej osobno oraz z zachowaniem dwutygodniowych odstępów.

Czas zabiegu uzależniony jest od rodzaju i wielkości zmiany. W przypadku zwykłych brodawek i kurzajek jest to 10-20 sekund (zależnie od wielkości), dla brodawek podeszwowych jest to 20-40 sekund (niezależnie od wielkości).

Po wykonaniu zabiegu, aby uniknąć zarażenia skóry wirusem należy odczekać 3 minuty i zdjąć wykorzystany aplikator używając do tego chusteczki.

Skład:

Dimetyloeter i płynny propan.

Pojemność: 50 ml