

Help4Skin Gojenie ran - żel w sprayu przyspieszający gojenie, 75g

Cena: 42,40 pln



Opis słownikowy

Producent	POLPHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny
Rekomendowana forma transportu	POLTRAF

Opis produktu

Help4Skin Gojenie ran to hydrokolooidowy, przyspieszający gojenie ran, pomagający uniknąć infekcji, i zapewniający bezbolesną zmianę opatrunku żel o działaniu przeciwbólowym.

Żel zamknięty jest w wygodnej puszcze umożliwiającej dozowanie właściwej ilości żelu w sprayu.

Może być stosowany u dzieci - powyżej 2 roku życia.

Help4Skin jest wyrobem medycznym.

Nie zawiera parabenów.

Wskazania:

Żelowy preparat Help4Skin Gojenie ran to produkt przeznaczony w ranach ostrych lub przewlekłych np. ranach chirurgicznych, otarciach, odleżynach, otwartych owrzodzeniach nóg i powierzchniowych oparzeń.

Help4Skin można stosować także w przypadku ran i owrzodzeń stóp powstałych w wyniku cukrzycy. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu diabetycy z problemami stóp powinni skonsultować się z lekarzem.

Forma sprayu pozwala na bezdotykowa aplikację.

Preparatu nie należy stosować na błony śluzowe, twarz, powieki i oczy.

Help4Skin Gojenie ran można stosować na otwarte i zamknięte rany. W przypadku ran zamkniętych nałożyć preparat na oczyszczony i zdezynfekowany obszar rany, jeśli trzeba założyć plaster lub bandaż. Przy ranach otwartych ranę należy uprzednio oczyścić, zdezynfekować i dokładnie osuszyć gazą, wtedy nanieść żel i założyć opatrunek. Plaster lub bandaż i żel zmieniać przynajmniej raz dziennie. Gdy na ranie pojawi się strup zmniejszyć ilość stosowanego żelu.

Działanie:

Przy leczeniu ran suchych np. ran chirurgicznych i otarć działa okluzyjnie - zmniejsza utratę płynu przez naskórek i hamuje parowanie.

Karnozyna zawarta w żelu buforuje kwaśne polimery i działa przeciwutleniająco.

Karbomer schładza i zmiękcza miejsce kontaktu z bandażem lub plastrem i pochłania nadmiar płynu z ran sączących się i nadmiernie wilgotnych.

Ze względu na zwiększone ciśnienie opakowania przy pierwszym użyciu zaleca się skierowanie strumienia w innym kierunku niż rana.

Skład:

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Pojemność: spray 75g



Dla tego produktu REKOMENDUJEMY wybór przewoźnika POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS gwarantującego transport tego produktu w bezpiecznej dla towaru temperaturze pokojowej tj. 15-25°C bez względu na warunki atmosferyczne mróz czy upał. Wybór przez Klienta innego sposobu dostawy nie gwarantującego transportu i przechowywania przesyłek w temperaturze pokojowej 15-25°C, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może spowodować utratę właściwości fizycznych lub chemicznych produktu, pomimo zapakowania produktu przez Sprzedawcę na czas transportu wg określonych przez przewoźników standardów zabezpieczenia przesyłek kurierskich lub pocztowych.

