

## Kulki do ćwiczenia mięśni Kegla Sweet Smile z pilotem - różowe

Cena: 136,90 pln



### Opis słownikowy

Producent Sweet Smile

### Opis produktu

Kulki do ćwiczenia mięśni Kegla Sweet Smile z zasilanym bateryjnie pilotem wykonane z miękkiego i przyjemnego w dotyku silikonu, który zapewnia jedwabiące gładki dotyk.

Produkt służy do treningu i ćwiczenia mięśni Kegla, stymuluje dolne mięśnie miednicy. Urządzenie ułatwia poród i przyspiesza dojście do formy po urodzeniu dziecka. Ponadto jest pomocne przy nietrzymaniu moczu. Mięśnie Kegla są współodpowiedzialne za podtrzymywanie macicy i kontrolę pęcherza, wraz z wiekiem stają się one coraz słabsze. Ćwiczenia z kulkami gejszy wspomagają utrzymanie ich w dobrej kondycji.

Kulki kegla Sweet Smile to urządzenie to produkt który posiada 10 różnych poziomów wibracji i pilota umożliwiającego sterowanie i dobór najbardziej odpowiedniego ustawienia spośród dostępnych. Kulki ładowane są przy użyciu kabla USB, pilota natomiast zasilany jest baterią (dołączona do zestawu).

Pilot pozwala na kontrolowanie działania kulek, daje użytkowniczkom swobodę i większe możliwości dopasowania trybu pracy kulek do indywidualnych potrzeb.

Produkt posiada elastyczny pasek, ułatwiający wyjmowanie kulek po zakończonym treningu. Dzięki 10 trybom wibracji i mocnemu, cichemu silnikowi, ćwiczenie może stać się przyjemniejsze i za każdym razem być inaczej odczuwane.

#### Właściwości:

- Przyjazne dla skóry
- Wibrujące
- Stymulujące
- Wodoodporne

#### Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem, umyć kulki ciepłą wodą z mydłem. Aby zapobiec uszkodzeniom zadbać żeby woda nie dostała się do komory baterii. Naładować kulki i umieścić baterię w pilocie (jeśli jej nie ma wewnątrz).

Zaaplikować na produkt odpowiedni lubrykant (wyłącznie na bazie wody).

Przyjąć komfortową pozycję, leżącą lub w przysiadzie i umieścić produkt w waginie.

Jeśli kulki są umieszczone prawidłowo można włączyć urządzenie i sterując pilotem dobrać odpowiednie ustawienie wibracji. Jeśli przy włożonych kulkach odczuwa się dyskomfort należy wyjąć je przy użyciu pętli na końcu i spróbować umieścić je ponownie.

Aby trening z kulkami był efektywny powinno się go przeprowadzać 1-2 razy dziennie przez około 15 minut. W czasie ćwiczenia można wykonywać codzienne normalne czynności. Najlepszy efekt przynosi stosowanie kulek podczas poruszania się, stania lub chodzenia.

Aby uniknąć przeciążeń i tym samym zakwasów mięśni dna miednicy, pamiętajmy, aby już na początku nie przesadzić z treningiem. W przypadku problemu z utrzymaniem kulek, najlepiej jest zacząć od kulek o większym rozmiarze lub mniejszej wadze.

#### Środki ostrożności:

Przechowywać z dala od dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.

Nie stosować w przypadku uszkodzonej lub podrażnionej skóry.

Produkt przeznaczony do użytku przez jedną osobę. W celu uniknięcia infekcji lub chorób nie należy korzystać z kulek innymi osobami.

W przypadku odczuwania dyskomfortu lub nieprzyjemnego podrażnienia zaprzestać stosowania produktu.

Nie zamrażać ani nie podgrzewać urządzenia.

Stosować produkt wyłącznie gdy jest się w dobrym stanie fizycznym.

**Kolor:** różowy, czarny

**Długość:** 16,4cm

**Długość kulek:** 8,9cm

**Średnica:** 1,5-3,3cm

**Waga:** 81g

**Materiał:** Silikon, PU, ABS

**Zasilanie pilota:** bateria 23A (dołączona do urządzenia)

Zestaw zawiera kulki kegla, kabel USB do ładowania, pilota i baterię (23A).

## Galeria

