

Maseczka do komory inhalacyjnej RespiChamber

Cena od: 87,75 pln



Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Maseczki na twarz do użytkowania z komorą inhalacyjną do użytku szpitalnego RespiChamber, dzięki którym komora jest idealna dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dzięki możliwości zmiany maseczki i autoklawowania komory jest to produkt, który może być stosowany przez wielu pacjentów

Używanie komory inhalacyjnej RespiChamber z maską

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Zdjąć nasadkę z inhalatora. Bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć inhalatorem zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.
2. Wsunąć maskę do komory. Włożyć inhalator do tylnej części komory. Nałożyć maskę na twarz i zapewnić skuteczne uszczelnienie.
3. Wykonać wydech, a następnie naciśnij raz inhalator na początku powolnego wdechu. Przytrzymać maskę na miejscu i wdychać i wdychać przez komorę przez 5-6 oddechów.

Maseczka dostępna jest w trzech rozmiarach odpowiednich do wieku użytkownika:

S - 0-18 miesięcy (1135356)

M - 1-5 lat (113537)

L - powyżej 5 lat (113557)