

Nutricia Flocare® Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark® - 594825



Cena: 183,70 pln

Opis słownikowy


Producent	Nutricia
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zgłębnik nosowo-jelitowy Flocare® Bengmark® to wyrób medyczny przeznaczony do podawania diety bezpośrednio do jelita cienkiego.

Właściwości:

- materiał zgłębnika to biała, całkowicie nieprzezroczysta poliuretanowa rurka
- metalowa prowadnica pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika
- opatentowana spirala Bengmark® (2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm), pętla rozprostowuje się podczas wprowadzania prowadnicy, po usunięciu prowadnicy spirala ułatwia przejście przez odźwiernik i pozwala przyjąć optymalne ułożenie w jelicie cienkim.
- hydromerowa® powłoka na końcówce zgłębnika
- posiada owalną końcówkę z dwoma bocznymi otworami

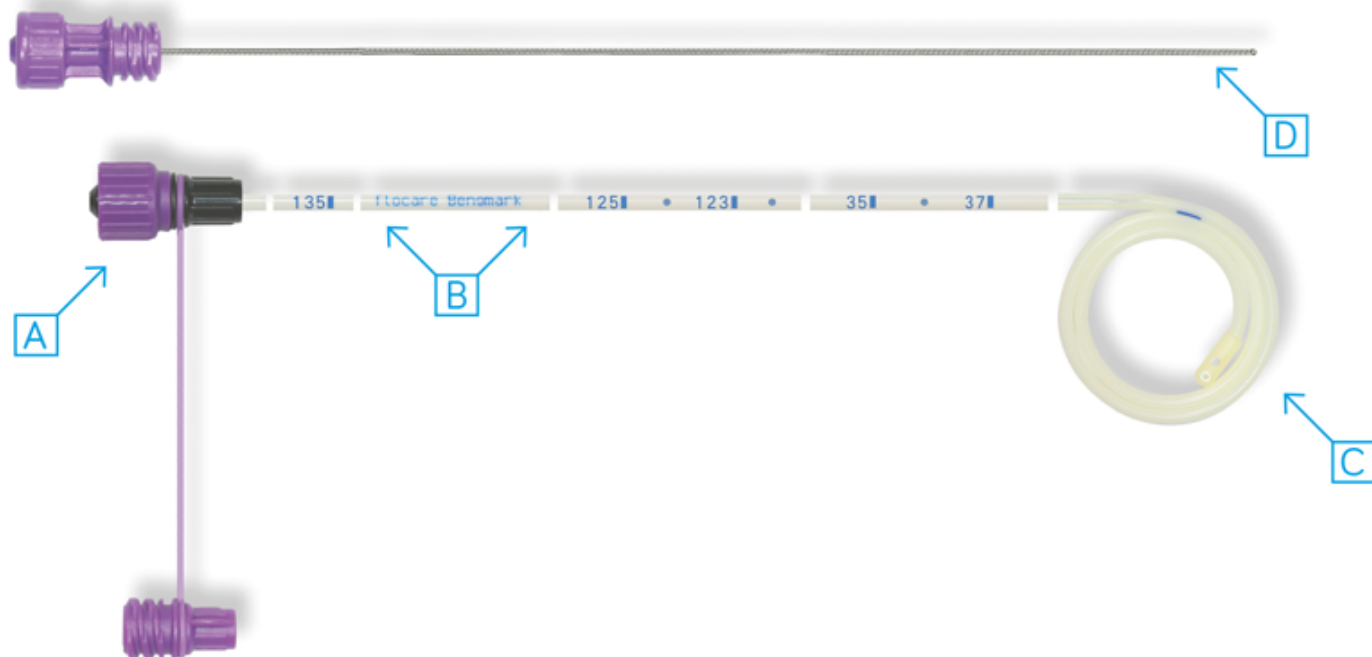

Części składowe:

- A. Łącznik ENFit® umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit® lub strzykawką ENFit®
- B. Nieprzezroczysty przewód zgłębnika, kontrastujący w promieniach RTG - z nadrukowanymi znacznikami długości i nazwą produktu
- C. Spirala Bengmark® (opatentowana)
- D. Prowadnica metalowa, pokryta środkiem poślizgowym, częściowo wprowadzona do zgłębnika z łącznikiem ENFit®

Wskazania do zaodźwiernikowego żywienia przez zgłębnik:

- zwiększone ryzyko aspiracji, refluksu i/lub wymiotów (często we wczesnej fazie pooperacyjnej)
- ostre zapalenie trzustki
- upośledzona motoryka żołądka
- oparzenia
- u pacjentów chirurgicznych

W przypadku zachowanej motoryki żołądka, zgłębnik może być umieszczony w żołądku, spirala Bengmark® zostanie przemieszczona samoistnie przez odźwiernik w czasie 8-12 godzin.

Jeżeli motoryka żołądka jest upośledzona częściowo lub całkowicie, zgłębnik można przeprowadzić przez odźwiernik przy pomocy alternatywnych technik, takich jak endoskopia czy fluoroskopia.

Motorykę żołądka można pobudzić poprzez stosowanie odpowiednich leków, pobudzających perystaltykę jelit.

Producent zaleca zakładanie nowego zgłębnika nosowo-jelitowego Bengmark® co 6-8 tygodni.

W celu kontroli szybkości przepływu zaleca się podawanie diety do jelita cienkiego zawsze przy użyciu pompy do żywienia drogą przewodu pokarmowego.

W celu uniknięcia podrażnień i ewentualnych infekcji należy pamiętać o właściwej pielęgnacji skóry wokół miejsca, gdzie jest umocowany zgłębnik.

Do mocowania zgłębnika używać plastra zaleconego przez lekarza. Przed jego założeniem należy dokładnie umyć ręce. Plaster zmieniać codziennie. Podczas zmiany plastra, po jego zdjęciu umyć twarz w miejscu jego przyklepienia i wytrzeć skórę do sucha. Za każdym razem poleca się nieco zmieniać miejsce przyklepienia plastra.

Jeśli skóra jest zaczerwieniona, podrażniona lub piecze, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Może być konieczne przełożenie zgłębnika do drugiego nozdrza.

Unikać używania kremów, proszków lub talku na skórze w okolicy zglębniaka, gdyż kosmetyki mogą uszkodzić zglębniak.

Rozmiar: CH10

Długość: 145 cm

Kod produktu: 594825