

Olejek HyperOil do wszystkich rodzajów ran, owrzodzeń, odleżyn - atomizer 100 ml



Cena: 169,90 pln

Opis słownikowy

Producent	RI.MOS.
Produkt z REFUNDACJĄ NFZ DLA KODU	W.02.01 (P.141)
Rejestracja	Wyrób medyczny
Rekomendowana forma transportu	POLTRAF

Opis produktu

Hyper Oil - do wszystkich rodzajów ran oraz każdej fazie ich gojenia.

Opakowanie: 100ml z atomizerem (wystarcza na 2-3 miesiące przy średnim zużyciu w przypadku rany 10x10)

Hyper Oil aktywnie wspomaga ziarninowacenie i odbudowę nabłonka, wpływa na regenerację fizjologiczną i odbudowę tkanki, jednocześnie zapobiega uszkodzeniom skóry wokół zmian, powikłaniom bakteryjnym, pasożytom oraz końcowemu zwłóknieniu zbliznowaceni.

Hyper Oil to wielofunkcyjny samowystarczalny zaawansowany opatrunek, zapewniający regenerację i odbudowę skóry w przypadkach poważnych lub przewlekłych zmian skórnych:

- nie wymaga stosowania środków odkażających
- skraca terapię antybiotykową
- zatrzymuje infekcje i zmiany martwicze
- redukuje ból, opuchliznę zaczerwienienie
- wspomaga oczyszczanie rany
- zapobiega tworzeniu się strupa, ponieważ sprzyja mokremu gojeniu się rany
- stanowi ochronę dla tkanki wokół zmiany skórnej
- wspomaga tworzenie się tkanki ziarninowej oraz odbudowę nabłonka zapobiegając oszpeceniu
- redukuje tworzenie się blizn

Substancja czynna: Hyperforyna, Azadyrachtyna

Przeznaczenie: odleżyny, zespół stopy cukrzycowej, oparzenia, urazy skóry (nawet zainfekowane i z odsłoniętymi kośćmi), wszelkiego rodzaju wrzody, przetoki, pęknięcia skóry, popromienne zapalenia skóry, pooperacyjne zmiany skórne, wrosnięte paznokcie, hemoroidy, ropnie, przeszczepy skórne, otarcia, opryszczka, egzemy, grzybice, grzybice paznokci, zanokcice, trądzik wirusowy, pokrzywka, świąd okolic intymnych, odmrożenia, ugryzienia komarów, a także wiele innych schorzeń...

Instrukcja użycia:

- ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej
- nie dezynfekować!
- osuszyć gazowym jałowym gazikiem
- pokryć ranę cienką warstwą odpowiedniego opatrunku (w fazie ostrej zalecany jest olejek)
- w przypadku głębokich odleżyn wypełnić wgłębienie nasączonym opatrunkiem i pozostawić na 48H
- zabezpieczyć bandażem lub plastrem
- czynność powtórzyć po 24H (rany płytke)
- po rozpoczęciu procesu gojenia można zmniejszyć częstotliwość zmiany opatrunku na co 48H i 72H a w końcowej fazie nawet co kilka dni
- po rozpoczęciu zairinowania można przejść na stosowanie konsystencji żelu (tańszy i szybciej się wchłania)
- preparat można stosować nawet w przypadku martwicy (pomocze pozbyć się martwej tkanki)
- w okresie zimowym olejek może ulegać krystalizacji (krystalizacja jest naturalnym procesem zachodzącym w olejku, jeśli jest przechowywany w temperaturze poniżej pokojowej), w takim przypadku w celu odwrócenia procesu należy zanurzyć go w ciepłej wodzie na ok 10 min. do uzyskania konsystencji olejku lub przenieść buteleczkę w miejsce, gdzie jest ciepłej.

Produkty HYPEROIL to wielofunkcyjne, samowystarczalne, zaawansowane opatrunki, które pomagają w regeneracji i leczeniu skóry w przypadku jakiegokolwiek jej uszkodzenia.

Produkty HYPEROIL są w 100% pochodzenia roślinnego.

To mieszanka dwóch olejków pozyskanych z drzewa Neem i Dziurawca

Produkty HYPEROIL możemy stosować w każdej fazie gojenia się ran, nie wymagają innych opatrunków ani dezynfekcji.



Dla tego produktu REKOMENDUJEMY wybór przewoźnika POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS gwarantującego transport tego produktu w bezpiecznej dla towaru temperaturze pokojowej tj. 15-25°C bez względu na warunki atmosferyczne mróz czy upał. Wybór przez Klienta innego sposobu dostawy nie gwarantującego transportu i przechowywania przesyłek w temperaturze pokojowej 15-25°C, co przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych może spowodować utratę właściwości fizycznych lub chemicznych produktu, pomimo zapakowania produktu przez Sprzedawcę na czas transportu wg określonych przez przewoźników standardów zabezpieczenia przesyłek kurierskich lub pocztowych.

