

Pas do unieruchamiania miednicy Sam Pelvic Sling II

Cena: 567,00 pln



Opis słownikowy

Producent	SAM Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pas do unieruchamiania miednicy Sam Pelvic Sling II w wersji cywilnej (kolor niebieski) zaprojektowany w sposób zapewniający ochronę i skuteczne unieruchomienie złamań miednicy.

Produkt opatentowany, posiada automatycznie zatrzymującą się klamrę z ząbkami, które blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu - sprzączka nie pozwala na wywarcie siły większej niż 14,8 kg. Jest to istotne podczas akcji ratunkowych, podczas których działający pod wpływem stresu personel medyczny może użyć nadmiernej siły, co może z kolei być szkodliwe lub bolesne dla pacjenta.

Charakterystyka

- możliwość przesuwania pasa pod uszkodzonym,
- posiada automatycznie blokującą się klamrę skutecznie unieruchamiającą otwarte złamania miednicy,
- zapewnia kontrolę siły zacisku,
- przenikalny dla promieni X materiał (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze),
- bezpieczny w kontakcie z urządzeniami do rezonansu magnetycznego (MRI),
- łatwy do czyszczenia przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych.

Sposób zakładania:

1. Usunąć z kierzni pacjenta lub z okolicy jego miednicy wszystkie przedmioty. Włożyć pas Sam Pelvic Sling II szarą stroną do góry pod pośladki (biodra) uszkodzonego.
2. Przełożyć i przeciągnąć czarny pasek przez sprzączkę.
3. Chwycić pomarańczowy pasek i pociągnąć czarny pasek w przeciwnym kierunku, aż do usłyszenia kliknięcia sprzączki. Utrzymując naciąganie od razu docisnąć czarny pasek do powierzchni pasa Sam Pelvic Sling II w celu zamocowania go w tym położeniu.

Kolor: niebieski (wersja cywilna)

Rozmiar: uniwersalny



Kompleksowe zaopatrzenie od 1997 r.

dlpacjenta.pl

Internetowy Sklep Medyczny i Zielarski

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlpacjenta.pl