

## Protefix - podściółki mocujące do protez zębowych (dla żuchwy)

Cena: 18,30 pln



### Opis słownikowy

Producent	Queisser
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Protefix - Podściółki mocujące do całkowitych protez zębowych (dla żuchwy).

Podściółki mocujące Protefix® należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy.

Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

### Właściwości:

- pewnie mocują protezę

- chronią przed uciskiem
- zabezpieczają przy odchyleniach w w anatomii zgryzu
- nie zmieniają odczuć smakowych

#### **Stosowanie:**

Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy przyciąć podściółkę odpowiednio nożyczkami wzdłuż jej prostego brzegu.

Podściółkę zwilżyć zanurzając ją na ok. 10 sekund w letniej wodzie po czym wyjąć ją i pozwolić wodzie obcieknąć.

Produkt nałożyć dowolną stroną na zwilżoną protezę. Tylne 2 mm protezy musi pozostać nieprzykryte.

Podściółkę docisnąć palcem do zagłębienia zuchwowego protezy (zaczynając od środka), aż będzie w każdym miejscu gładko przylegała.

W przypadku zmniejszenia przyczepności wyjąć protezę a podściółkę posypać proszkiem mocującym Protefix.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

**Skład:** 100g podściółki zawiera: alginian sodowy 28g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72g.

**Opakowanie:** 30 szt