

RespiChamber Hospital komora inhalacyjna do użytku szpitalnego

Cena: 105,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Komora inhalacyjna RespiChamber Hospital jest urządzeniem umożliwiającym podanie pacjentowi aerozolu wziewnego bez konieczności przerywania terapii tlenowej

Produkt posiada zastawkę reagującą na przepływy o niskim natężeniu oraz wspiera podawanie odmierzonej dawki leków z inhalatora do płuc chorego.

Komora została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w szpitalach. Spełnia wszelkie wymagania dotyczące czystości i higieny. Może być sterylizowana w wysokich temperaturach w autoklawie, dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku i może być używana przez wielu pacjentów.

Do komory można dokupić **maskę na twarz** w trzech rozmiarach S (0-18 miesięcy), M (1-5 lat), L (powyżej 5 roku życia), dzięki czemu jest odpowiednia dla osób w każdym wieku.

Właściwości:

- mała i poręczna komora o pojemności 149 ml
- antystatyczna komora dla równomiernego podawania leku
- może być stosowana ze wszystkimi powszechnie przepisywanymi inhalatorami z odmierzaną dawką
- dzięki możliwości sterylizacji w autoklawie może być użytkowany przez wielu pacjentów
- posiada zastawkę reagującą na przepływy o niskim natężeniu
- nie zawiera BPA i lateksu
- możliwość dokupienia masek w rozmiarach S, M lub L

Użytkowanie z ustnikiem

1. Zdjąć nasadkę z inhalatora. Bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć inhalatorem zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.
2. Włożyć inhalator do tylnej części komory. Włożyć ustnik do ust i zamknąć wokół niego usta, aby zapewnić skuteczne uszczelnienie.
3. Wykonać wydech, a następnie nacisnąć raz inhalator na początku powolnego wdechu. Wdychać powoli i głęboko przez komorę, aż do pełnego wdechu. Wstrzymać oddech na 5-10 sekund przed wydechem. LUB Zrobić wydech i nacisnąć raz inhalator na początku powolnego wdechu. Wdychać i wydychać powietrze przez komorę przez 2-3 oddechy, utrzymując szczelność między ustami a ustnikiem komory.

Używanie z maseczką

1. Zdjąć nasadkę z inhalatora. Bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć inhalatorem zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.
2. Wsunąć maskę do komory. Włożyć inhalator do tylnej części komory. Nałożyć maskę na twarz i zapewnić skuteczne uszczelnienie.
3. Wykonać wydech, a następnie naciśnij raz inhalator na początku powolnego wdechu. Przytrzymać maskę na miejscu i wdychać i wydychać przez komorę przez 5-6 oddechów.

Kod produktu: 113505