

Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym HVLP 7.0 - 1 szt.



Cena: 5,70 pln

Opis słownikowy

Producent	CEZETEL - POZNAŃ
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym HVLP.

Sposób użycia:

- przed użyciem należy napompować mankiet w celu jego sprawdzenia
- opróżnić mankiet z powietrza przed intubacją by ułatwić włożenie rurki oraz uniknąć zniszczenia mankieta
- po intubacji napompować mankiet używając minimalnego ciśnienia powietrza, aby uzyskać prawidłowe uszczelnienie
- sprawdzić czy uszczelnienie jest prawidłowe.

Wyrób pakowany pojedynczo. Sterylny.

Rozmiar: 7.0

Opakowanie: 1 szt.