

SCHÜLKE Aplikator waginalny do preparatu Octenisept



Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Schulke-Mayr
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu


Aplikator waginalny do stosowania z preparatem antyseptycznym Octenisept® o pojemności 50ml.

Zalety:

- prosta i dyskretna obsługa
- optymalne zwilżenie powierzchni nabłonka pochwy

Sposób użycia i aplikacja:

1. Przed pierwszym użyciem wyjąć aplikator (c) z foliowego opakowania i po zdjęciu przezroczystej nasadki ochronnej (a) oraz główicy rozpylającej (b) i umieścić go na butelce z preparatem Octenisept® o pojemności 50ml.
2. Przed wprowadzeniem aplikatora nacisnąć kilkakrotnie główkę aplikatora, tak aby preparat wydostał się z jego otworów. Mechanizm rozpylający można obsługiwać pod różnymi kątami nachylenia butelki (w pozycji pionowej lub do góry dnem).
3. Producent zaleca wkładanie aplikatora głęboko do pochwy podczas siedzenia w toalecie. W tej pozycji należy nacisnąć palcem wskazującym nasadkę aplikatora 10 razy, aby rozprowadzić preparat w głąb pochwy.
4. Po użyciu rozpylić nieco więcej produktu, np. nad umywalką, aplikatorem skierowanym w dół. Następnie wypłukać aplikator pod bieżącą wodą i wysuszyć czystą ściereczką.

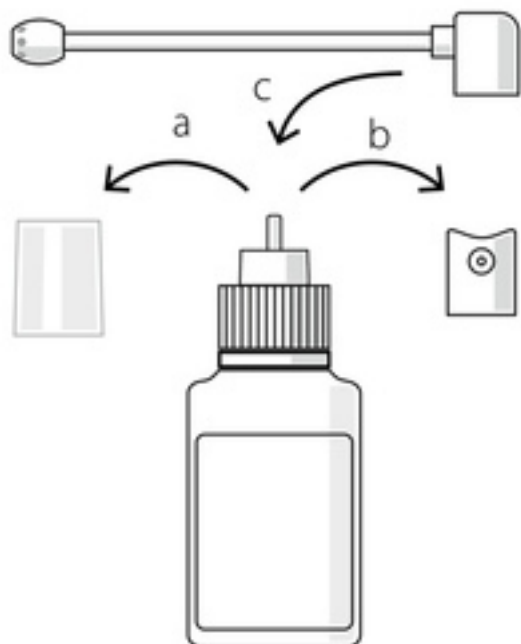

Przed ponownym użyciem aplikatora ponownie go wyczyścić postępując zgodnie z procesem czyszczenia z punktu 4.

Aplikator można stosować podczas jednego cyklu leczenia. Po zakończeniu terapii dopochwowej aplikator należy wyrzucić postępując tak jak z innymi odpadami domowymi.

Produkt nieodpowiedni dla pacjentek poniżej 8. roku życia. Należy go stosować wyłącznie do dopochwowej aplikacji preparatu Octenisept® i nie należy go stosować do innych otworów ciała (np. odbyt, nos, ucho).

Przed użyciem produktu leczniczego Octenispet® należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.