

She-Ology™ Wearable Vaginal Dilator Set - zestaw treningowy dildo, rozszerzacz pochwy - 3szt.



Cena: 259,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie	3 szt.
Producent	Calexotics


Opis produktu

Zestaw rozszerzaczy pochwy She-ology™ Advanced o wyprofilowanym, ergonomicznie zakrzywionym kształcie w trzech stopniowo zwiększających się rozmiarach. Produkt umożliwi delikatne rozszerzanie pochwy. Dzięki zakrzywionemu kształtowi jest łatwy i delikatny we wkładaniu i stymulacji.

Zestaw pomaga w zwiększeniu elastyczności mięśni pochwy i zmniejszeniu odczuwanego dyskomfortu, zarówno podczas wkładania go lub odbywania stosunku.

Dzięki unikalnej, nadającej się do noszenia konstrukcji, każdy dilator jest zakończony elastyczną podstawą z kołnierzem, co wpływa na zapewniającą wygodę i mobilność.

Materiał z jakiego wykonany jest produkt to hipoalergiczny silikon, który jest bezpieczny dla ciała, bezzapachowy i wolny od ftalanów.

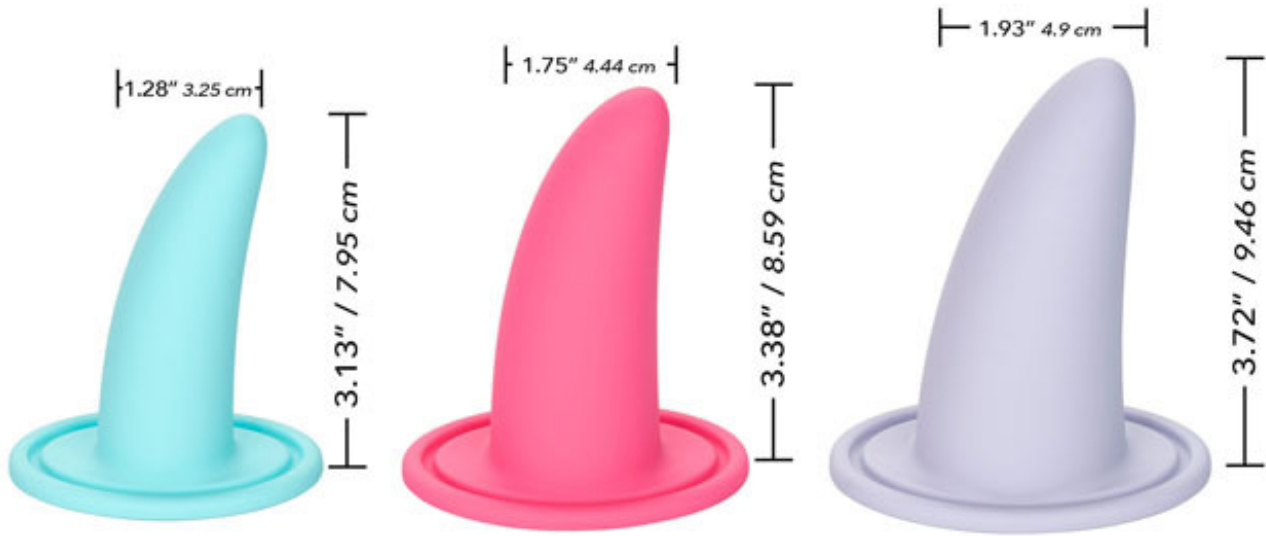

Sposób użycia:

Użytkowanie rozszerzaczy należy rozpocząć od najmniejszego rozmiaru.

Produkt przed i po każdym użyciu umyć ciepłą wodą z dodatkiem bezzapachowego mydła.

Przyjąć komfortową pozycję. Naturalna pozycja sprzyjająca wprowadzeniu dilatora to oparcie jednej nogi o deskę klozetową lub pozycja leżąca z uniesionymi do pozycji żaby nogami.

Rozluźnić mięśnie dna miednicy, wziąć kilka głębokich oddechów i używając dominującej ręki delikatnie wprowadzić gadżet aż jego podstawa znajdzie się równo w stosunku do pochwy. Przed aplikacją zaleca się zastosowanie lubrykantu na bazie wody. W utrzymaniu dilatora na miejscu, zwłaszcza podczas przyjęcia pionowej pozycji, pomaga założenie bielizny dopasowanej do sylwetki.

Celem ćwiczeń jest delikatne, stopniowe rozciąganie ścian pochwy, zmniejszenie dyskomfortu podczas stosunku czy nawet w pochwy. Gdy jeden rozmiar uda się umieścić w pochwie bez odczuwania dyskomfortu, można przejść do kolejnego, większego rozmiaru i sukcesywnie dojść do największego.

Każdy dilator posiada otwór w podstawie, w którym dla zwiększenia przyjemności lub intensywności ćwiczeń można umieścić wibrujący stymulator, mogący pomóc w rozluźnieniu mięśni podczas przechodzenia do produktu o większym rozmiarze.

Zaleca się używać dilatora 2-4 razy w tygodniu przez 5-30 minut w zależności od stopnia komfortu.

Wymiary:

Dilator 1: 7,95 cm x 3,2 5cm

Dilator 2: 8,59 cm x 4,44 cm

Dilator 3: 9,46 cm x 4,9 cm

Opakowanie: 3 szt

Galeria

