

Suma Alcohol Spray D4.12 do dezynfekcji powierzchni 750 ml



Cena: 25,90 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Pojemność	750ml
Producent	Diversey
Rejestracja	Produkt biobójczy

Opis produktu

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów oparty na etanolu. Produkt jest odpowiedni do stosowania w służbie zdrowia oraz obszarze spożywczym. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. Jest odpowiedni do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni i sprzętów, także mających kontakt z żywnością.

Cechy:

Oparty na bazie etanolu, bezbarwny, przejrzysty płyn.

Szybko odparowuje i nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach.

Bezzapachowy, dzięki czemu jest odpowiedni do stosowania w obszarach mających i nie mających kontaktu z żywnością.

Skuteczny przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów, skuteczny wobec Pollo-, Adeno- oraz Murine Norowirus.

Krótki czas działania – już w 15 sekund

Sposób użycia:

Preparat jest gotowy do użycia. W celu użycia należy natryśnąć go na powierzchnię, przetrzeć tak, aby cała powierzchnia była zwilżona

przez zalecany czas kontaktu i pozostawić do wyschnięcia.

Zdezynfekowane powierzchnie nie wymagają płukania.

Zaleca się unikać opryskiwania powierzchni znajdujących się w pobliżu niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych oraz w pobliżu źródeł zapłonu (np. otwartego ognia). Preparatu nie należy rozpylać na gorące powierzchnie.

Kompatybilność produktu:

Preparat stosowany zgodnie z zaleceniami, jest bezpieczny dla większości powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Zalecane jest unikanie stosowania preparatu na powierzchniach poliwęglanowych i innych podatnych na pękanie plastikach. W przypadku wątpliwości przed długotrwałym stosowaniem, zaleca się wykonanie testu na poszczególnych materiałach.

Skuteczność mikrobójcza:

Bakterie: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*

Grzyby: *Candida albicans*, *Aspergillus brasiliensis* (niger)

Wirusy: Adenowirus, Poliowirus, Murine Norovirus

Prątki: *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terre*

Skład preparatu:

Etanol 771g/kg, propan 2-ol (3%-10%)

Pojemność: 750 ml

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.