

# Tampon podpierający ProDry przy nietrzymaniu moczu - 1 szt.

Cena: 18,90 pln



## Opis słownikowy

Aby otrzymać artykuł w wygodnym opakowaniu zbiorczym kup	10 szt.
Producent	Innocept
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Tampon podpierający ProDry opracowany został z myślą o kobietach cierpiących na wysiłkowe nietrzymanie moczu. Może być stosowany podczas wysiłku fizycznego, takiego jak ćwiczenia, podnoszenie, noszenie, dźwiganie, czy nawet wchodzenie po schodach, kaszel czy kichania.

Produkt ma owalny kształt, jest wykonany z delikatnej i elastycznej pianki PVA (polialkohol winylowy). Po wprowadzeniu do pochwy dopasowuje się do jej kształtu i powoduje zwiększenie miejscowego fizycznego nacisku na mięśnie dna miednicy, sprzyja to zamknięciu cewki moczowej i zapobiega mimowolnemu wydostawaniu się z niej moczu. Tampon po włożeniu podpira narządy i stabilizuje cewkę moczową, dzięki czemu zapobiega gubieniu moczu i eliminuje objawy obniżenia.

Jest łatwy w założeniu, nie utrudnia normalnego oddawania moczu i jest niewyczuwalny podczas aktywności. W celu wyjęcia tamponu należy pociągnąć za sznureczek.

Wyrób medyczny jednorazowego użytku - może pozostawać w pochwie do 12 godzin. Nie należy go używać ponownie, ponieważ może wystąpić zagrożenie zanieczyszczenia krzyżowego, ryzyka zakażenia, pogorszenia i zmiany właściwości wyrobu w wyniku pierwszego użytkowania, a w następstwie od urazu.

### Przeciwwskazania:

Nie stosować podczas snu, w przypadku zapalenia pochwy, podczas menstruacji, w odbycie lub w cewce moczowej, w połączeniu z jakimkolwiek innym wyrobem dopochwowym, w tym z tamponami menstruacyjnymi.

**Długość:** 57 mm

**Średnica:** 32 mm

