

UrgoClean Ag opatrunek ze srebrem 10x10cm - 1 szt.

Cena: 24,80 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | URGO Polfa |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Antybiofilmowy opatrunek UrgoClean Ag wykorzystuje technologię TLC, która jest wzbogacona siarczanem srebra. W kontakcie z wysiękiem z rany uwalnia on jony srebra (stąd nazwa TLC Ag).

Opatrunek wskazany jest do stosowania na rany ostre: oparzenia, rany pourazowe, rany chirurgiczne oraz na rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej.

Wyrób zbudowany jest z włókien poliakrylanu oraz matrycy TLC Ag, zapewnia to działanie antybiofilmowe opatrunku oraz kompleksowe działanie oczyszczające. Produkt wskazany jest do stosowania na rany z objawami miejscowej infekcji lub z ryzykiem zakażenia, z biofilmem lub z martwicą rozplywną.

Właściwości:

- miejscowo zwalcza zakażenie, zmniejszając liczbę bakterii w ranie
- silne działanie antybiofilmowe i antibakteryjne m.in. wobec *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* i *Pseudomonas aeruginosa*,
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające (usuwa wysięk z rany, martwicę rozplywną i obumarłe tkanki)
- dzięki synergii działania włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) i jonów Ag + usuwa biofilm i zapobiega jego rekonstrukcji
- może być używany w terapii kompresyjnej
- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- produkt przebadany klinicznie

Działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum już po 30 minutach wobec głównych szczepów - przebadane na 40 szczepach bakteryjnych kolonizujących ranę, w tym szczepach opornych na antybiotyki (MRSA, VRE, bakterie wytwarzające β -laktamazy).

Sposób użycia:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przepłukać solą fizjologiczną.

Po 4 tygodniach stosowania opatrunek UrgoClean AG można zastąpić opatrunkiem UrgoStart Plus Pad w rozmiarze 10x12 cm lub 15x20 cm.

UrgoClean Ag wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. Jego dobór jest uzależniony od stopnia wysięku i umiejscowienia rany, może to być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 10x10 cm