

## UrgoClean Ag opatrunek ze srebrem 15x20cm - 1 szt.

Cena: 67,30 pln



### Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Antybiofilmowy opatrunek UrgoClean Ag o dużym rozmiarze rozmiarze odpowiedni do stosowania na większe rany. Produkt oparty na wykorzystywaniu wzbogaconej siarczanem srebra technologii TLC (lipidowo-koloidowa). W kontakcie z wysiękiem z rany uwalnia on jony srebra (stąd nazwa TLC Ag).

Wyrób zbudowany jest z włókien poliakrylanu oraz matrycy TLC Ag, co zapewnia opatrunkowi działanie antybiofilmowe oraz kompleksowe działanie oczyszczające.

Produkt wskazany jest do stosowania na rany z objawami miejscowej infekcji lub z ryzykiem zakażenia, z biofilmem lub z martwicą rozpułynną. Jest odpowiedni w przypadku ran ostrych: oparzenia, rany pourazowe, rany chirurgiczne oraz ran przewlekłych: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej.

#### Właściwości:

- dzięki żelującej matrycy TLC, utrzymującej optymalnie wilgotne środowisko pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- wykazuje kompleksowe działanie oczyszczające (usuwa wysięk z rany, martwicę rozpułynną i obumarłe tkanki)
- dzięki synergii działania włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) i jonów Ag + usuwa biofilm i zapobiega jego rekonstrukcji
- silne działanie antybiofilmowe i antibakteryjne m.in. wobec Staphylococcus aureus, MRSA, Streptococcus pyogenes i Pseudomonas aeruginosa,
- miejscowo zwalcza zakażenie, zmniejszając liczbę bakterii w ranie
- może być używany w terapii kompresyjnej
- produkt przebadany klinicznie

Opatrunek wykazuje działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum już po 30 minutach wobec głównych szczepów - przebadane na 40 szczepach bakteryjnych kolonizujących ranę, w tym szczepach opornych na antybiotyki (MRSA, VRE, bakterie wytwarzające  $\beta$ -laktamazy).

**Sposób użycia:**

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. W przypadku wcześniejszego zastosowania antyseptyku, przepłukać solą fizjologiczną.

Po 4 tygodniach stosowania opatrunek UrgoClean AG można zastąpić opatrunkiem UrgoStart Plus Pad w rozmiarze 10x12 cm lub 15x20 cm.

UrgoClean Ag wymaga zastosowania opatrunku wtórnego. Jego dobór jest uzależniony od stopnia wysięku i umiejscowienia rany, może to być UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

**Rozmiar:** 15x20 cm