

UrgoStart Plus Border opatrunek skracający czas leczenie ran 15x20 - 1 szt.

Cena: 84,35 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zbudowany z macierzy gojącej TLC-NOSF i włókien poliabsorbentu (poliakrylanu) samoprzylepny opatrunek chłonny wskazany do stosowania na rany bez cech infekcji.

Wyrób wykazuje działanie oczyszczające i wpływa na znaczne skrócenia czasu leczenia rany (nawet o 100 dni).

Wskazania:

- rany przewlekłe: owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny
- rany bez cech infekcji, z wysiękiem, w każdej z faz gojenia ran (od fazy oczyszczania z martwicy rozpułwnej do całkowitego wyleczenia)
- nieogójące się rany ostre

Właściwości:

- dzięki technologii TLC-NOSF skraca czas gojenia rany
- tworzy i utrzymuje optymalnie wilgotne, sprzyjającego procesowi gojenia środowiska w ranie
- dzięki włóknom poliabsorbentu oczyszcza ranę z martwicy rozpułwnej, wysięku i obumarłych tkanek, nie dopuszcza do maceracji skóry wokół rany
- ma właściwości hemostatyczne, tamuje niewielkie krwawienia
- umożliwia bezbolesne, bezurazowe zdejmowanie opatrunku
- oddychająca, wodoodporna warstwa zewnętrzna umożliwia stosowanie opatrunku przy krótkim kontakcie z wodą
- łatwy w mocowaniu dzięki samoprzylepnym, silikonowym brzegom
- dzięki wysokiej chłonności nie ma potrzeby stosowania opatrunku wtórnego

Sposób aplikacji:

Oczyszczyć ranę postępując z godnie z miejscowymi procedurami. Jeśli wcześniej zastosowano antyseptyk, przed założeniem opatrunku ranę przepłukać solą fizjologiczną.

Osuszyć i odtłuścić skórę wokół rany w celu zwiększenia przyczepności opatrunku.

Zdjąć z opatrunku folię ochronną i przyłożyć go bezpośrednio na ranę.

Opatrunek posiada kompres z wysokochłoną warstwę absorbującą wysięk, której nie należy przecinać. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, przycinać można samoprzylepne brzegi opatrunku.

Jeśli zostało to zalecone wyrób można stosować pod bandażem uciskowym.

Opatrunek UrgoStart Plus Border należy zmieniać co 1-2 dni w fazie oczyszczania rany z martwicy rozpuszczalnej. W kolejnych fazach - zależnie od objętości wysięku i stanu klinicznego rany. Produkt może pozostawać na ranie przez maksymalnie 7 dni.

Rozmiar: 15x20 cm