

UrgoTul Absorb Border opatrunek piankowy 8x8cm - 1 szt.



Cena: 9,25 pln

Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Samoprzylepny, piankowy opatrunek wykonany w technologii TLC (lipido-kołoidowej) wskazany do stosowania na rany z umiarkowanym i dużym wysiękiem. Produkt zbudowany jest z miękkiej, przylepnej warstwy TLC połączonej z miękką wkładką chłonną z przepuszczalnej dla gazów poliuretanowej pianki i cienkiej, wodoodpornej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach.

Wskazania:

- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej

Właściwości:

- warstwa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- wykazuje wysoki stopień chłonności, co zapobiega maceracji skóry
- stymuluje proliferację fibroblastów
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku,
- dzięki żelującej matrycy TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- dobrze dopasowuje się do różnych kształtów rany
- łatwy i wygodny w aplikacji i używaniu
- nie przywiera do rany, nie niszczy nowo powstałej tkanki
- jest wodoodporny
- nie wymaga wtórnego przytrzymania opatrunku, pozostaje na miejscu po nałożeniu
- chroni skórę wokół rany
- przebadany klinicznie

Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej użyto środka antyseptycznego, przed założeniem opatrunku, ranę należy ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

W celu poprawienia adhezji opatrunku, odtłuścić i osuszyć skórę wokół rany.

Z opatrunku zdjąć folię ochronną i miękką, przylegającą stroną przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Samoprzylepny silikonowy brzeg powinien znajdować się min. 1 cm od rany.

W zależności od stopnia wysięku i jej stanu klinicznego, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni. W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoTul Absorb Border może być stosowany jako opatrunek wtórny po uprzednim zaopatrzeniu rany innym opatrunkiem np. UrgoClean, AugoClean Ag lub Urgotul Ag/Silver, a także stosowany samodzielnie na rany bez cech infekcji.

Rozmiar: 8x8 cm

Rozmiar warstwy chłonnej: 4,5x4,5 cm