

UrgoTul opatrunek kontaktowy 20x30cm - 1 szt.

Cena: 72,45 pln



Opis słownikowy

Producent	URGO Polfa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

UrgoTul to opatrunek elastyczny wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), który stanowi warstwę kontaktową i wskazany jest do stosowania na rany o większej powierzchni z małym wysiękiem w fazie granulacji.

Wskazania:

- rany ostre: oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe, rany pooperacyjne
- rany przewlekłe: odleżyny, owrzodzenia kończyn dolnych, owrzodzenia stopy cukrzycowej
- Epidermolysis Bullosa (pęcherzowe oddzielanie się naskórka)

Właściwości:

- stymuluje proliferację fibroblastów
- warstwa lipidokoloidowa TLC zapewnia optymalną rekonstrukcję skóry właściwej i naskórka
- żelująca matryca TLC utrzymuje optymalnie wilgotne środowisko
- nie przywiera do rany i nie niszczy nowo powstałej tkanki
- łatwy w aplikacji, pozostaje na miejscu po nałożeniu
- może pozostawać na ranie przez okres do 7 dni
- chroni skórę wokół rany
- pozwala na bezbolesną i bezurazową zmianę opatrunku
- przebadany klinicznie również pod kątem pacjentów z Epidermolysis Bullosa (EB)

Sposób aplikacji:

Ranę oczyścić roztworem soli fizjologicznej. w przypadku wcześniejszego użycia antyseptyku, przed założeniem opatrunku ranę ostrożnie przepłukać solą fizjologiczną.

Zdjąć folię ochronną z opatrunku i przyłożyć go bezpośrednio na ranę. Opatrunek można przyciąć, aby był ok. 1-2 cm większy od brzegów rany.

W zależności od typu rany i jej stanu klinicznego, opatrunek należy zmieniać co 2-4 dni (co 1-3 dni w przypadku EB). W zależności od stanu rany, maksymalny czas przez jaki opatrunek może pozostać na ranie wynosi do 7 dni.

Opatrunek UrgoTul wymaga zastosowania opatrunku wtórnego, który dobiera się w zależności od lokalizacji rany i stopnia wysięku, może to być opatrunek UrgoTul Absorb lub UrgoTul Absorb Border.

Rozmiar: 20x30 cm