

Adapter EasyBag Bolus ENFit Fresenius - 7755694

Cena: 9,65 pln

Opis słownikowy

Producent	FRESENIUS KABI
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit.

Sposób użycia:

1. Wyjąć adapter z opakowania i zakręcić nakrętkę na worek EasyBag.
2. Włożyć kolec adaptera do pionowego worka z diety i mocno przykręcić.
3. Zdjąć zatyczkę z adaptera i podłączyć strzykawkę 60 ml.
4. Przechylić torbę EasyBag i delikatnie pobrać przepisaną ilość zawartości opakowania.
5. Odkręcić napełnioną strzykawkę od adaptera z torbką EasyBag w pozycji pionowej i zakręcić nasadkę adaptera Bolus.
6. Podłączyć napełnioną strzykawkę do końca rurki żywieniowej lub linii infuzyjnej i otworzyć zacisk (jeśli jest).
7. Delikatnie wcisnąć tłok, aby podawać żywność z odpowiednią prędkością, zamknąć zacisk i wyjąć strzykawkę.
8. Powtarzać kroki 4-7 aż do dostarczenia przepisanej ilości diety.
9. Przepłukać rurkę żywieniową wodą zgodnie z protokołem i zamknąć zacisk (jeśli jest)
10. Wyjąć strzykawkę z rurki do karmienia i założyć zatyczkę do rurki do karmienia. Pozostawić niezamocowaną rurkę podającą
11. Niewykorzystaną żywność przechowywać w lodówce i wyjąć z lodówki 30 minut przed kolejnym karmieniem. Resztki wyrzucić po 24 godzinach.
12. Pod koniec karmienia strzykawkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.

Kod produktu: 7755694