

ADHENAL SL Preparat do przyklejania protez zębowych 30g



Cena: 18,90 pln

Opis słownikowy

Producent	CHEMA RZESZÓW
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Preparat do przyklejania protez zębowych w postaci proszku, który pod wpływem wilgoci tworzy na powierzchni protezy lepką warstwę, umożliwiającą jej stabilizację, zalecany zwłaszcza w przypadku protez elastycznych.

Produkt może być stosowany także w przypadkach długotrwałego użytkowania protezy, w wyniku którego dochodzi w niektórych przypadkach do osłabienia retencji – do czasu podścielenia protezy.

Poprawa retencji protez, zwłaszcza w czasie adaptacji do protez pacjentów z trudnymi warunkami anatomicznymi, nie zapewniającymi odpowiedniej retencji protezy, także u pacjentów, u których względy psychiczne decydują o utrudnionej adaptacji do protez.

Sposób użycia:

Dośluzówkową powierzchnię płyty protezy dokładnie oczyścić, zwilżyć i posypać cienką warstwą

Nałożyć protezę zębową na właściwe miejsce w jamie ustnej, docisnąć i przytrzymać kilka sekund.

Po używaniu protezy w ciągu dnia należy usunąć wyrób z jej powierzchni, spłukując wodą i jednocześnie oczyszczając powierzchnię protezy miękką szczoteczką.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w suchym miejscu, w opakowaniu dokładnie zamkniętym.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 30 g