

AeroDawg komora aerozolowa dla psów (duży pies)

Cena: 359,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Trudell Medical
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

AeroDawg to komora aerozolowa opracowana z myślą o dużych psach przeznaczona do stosowania w celu podawania psom cierpiącym na przewlekłe zapalenie oskrzeli leków w formie aerozolu zgodnie z z zaleceniami weterynarza.

Dzięki uniwersalnemu portowi komorę AeroDawg* można stosować ze wszystkimi powszechnie przepisywanymi lekami wziewnymi, które weterynarz określi jako odpowiednie dla psa (z wyjątkiem inhalatorów proszkowych).

Komora jest antystatyczna i zatrzymuje lekarstwo dając psu więcej czasu na inhalację. Posiada bardzo czuły zawór inhalacyjny, zaprojektowany tak aby reagować na płytkie i niewielkie objętościowo i oddechy psa. Wskaźnik Flow-Vu* w komorze daje pewność, że zwierzę otrzymuje niezbędną dawkę lekarstwa. Wskaźnik pomaga ponadto policzyć liczbę oddechów wziętych przez psa, upewnić się, że maska dobrze przylega do pyska i że lek dostanie się do najgłębszych obszarów płuc psa.

Stosowanie leków podawanych wziewnie umożliwia ich ukierunkowane dostarczenie do płuc i wpływa na ograniczenie działania niepożądanego obserwowanego u psów leczonych lekami ogólnoustrojowymi.

Produkt dostępny także w wersji dla małego psa.

Objawy przewlekłego zapalenia oskrzeli u psów:

- krztuszenie się lub połykanie po kaszlu
- kaszel
- trudności w oddychaniu
- świszczący oddech przez 2-3 miesiące lub dłużej

Przewlekłe zapalenie oskrzeli u psów to jedna z najczęstszych dotyczących je chorób. Przez podobieństwo objawów do innych chorób jest trudna do zdiagnozowania. Psy na nią cierpiące mogą być również wrażliwe na alergeny domowe i środowiskowe.

Sposób użycia:

1. Zdjąć nasadkę z dozownika aerozolu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do dozownika aerozolu.
2. Włożyć dozownik aerozolu do tylnej części komory. Przytrzymać mocno komorę aerozolową oraz dozownik aerozolu i szybko potrząsnąć urządzeniem 4 do 5 razy bezpośrednio przed każdym użyciem.
3. Delikatnie umieścić maskę na pysku psa i upewnić się, że jest ona skutecznie uszczelniona. Podczas gdy pies wykonuje wdech, wskaźnik przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) powinien trzepotać lub poruszać się w kierunku psa. Jeśli zwierzę cierpi z powodu niepokoju podczas wykonywania tych czynności, skonsultuj się z lekarzem weterynarii.

4. Gdy pies przestaje wdychać lub gdy wykonuje wydech Flow-Vu* IFI powraca do pozycji pionowej.
5. Podczas gdy pies wykonuje wdech, nacisnąć dozownik aerozolu i przytrzymać maskę na pysku przez 5-6 oddechów. Utrzymać skuteczne uszczelnienie i użyć Flow-Vu* IFI do policzenia liczby oddechów. Należy upewnić się, że przestrzegane są instrukcje weterynarza dotyczące dawkowania i że jednorazowo podawana jest tylko jedna dawka leku.
6. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dozowniku aerozolu dotyczącymi czasu oczekiwania przed powtórzeniem kroków 2-5.

Komora aerozolowa AeroDawg* dla dużych psów jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić jego prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z instrukcją. NIE WOLNO go czyścić w zmywarce.

Instrukcja czyszczenia:

1. Komorę AeroDawg* należy czyścić przed pierwszym użyciem, później co tydzień.
2. Zdjąć tylko tył, adapter maski i maskę. NIE WOLNO próbować usuwać żadnych innych części.
3. Namoczyć wszystkie części w łagodnym roztworze płynu do mycia naczyń i letniej czystej wody przez 15 minut. Delikatnie mieszać tam i z powrotem.
4. Wypłukać części w czystej wodzie.
5. Strząsnąć nadmiar wody z wypłukanych części i pozwolić im wyschnąć na powietrzu ustawiając je w pozycji pionowej.
6. Przed ponownym montażem upewnić się, że części są suche. Nie wycierać do sucha.
7. Gdy urządzenie jest całkowicie suche i gotowe do użycia, należy ponownie zamocować tył, adapter maski i maskę.