

Apteo paski do zamykania ran w kolorze cielistym 6mm x 75mm - 3szt. (1 saszetka)

Cena: 3,95 pln



Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Sterylny paski w kolorze cielistym przeznaczone do nieinwazyjnego zamykania drobnych ran i cięć, pakowane w saszetki w których znajdują się 3 paski.

Właściwości:

- wytrzymałe
- elastyczne
- łatwe w użyciu
- hipoalergiczny klej
- dobrze przylegają do skóry
- kolor cielisty
- sterylne



Sposób użycia:

1. Oczyszczyć ranę i skórę w jej pobliżu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Wyciągnąć z saszetki pasek oraz odklejać pojedynczo z papieru ochronnego bezpośrednio przed użyciem.
3. Starannie zbliżyć do siebie brzoży rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
4. Przykleić kilka pasków w odległości około 2-3 mm od siebie.
5. W celu usunięcia paska, odkleić ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Środki ostrożności:

- Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.
Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.
Opatrunek zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.
W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, pasek należy usunąć.
Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.
W rzadkich przypadkach u dzieci może wystąpić wysypka spowodowana ciepłem lub wilgocą, szczególnie na twarzy. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie: 3 paski (1 saszetka) - 6mm x 75mm