

Apteo paski do zamykania ran w kolorze cielistym 6mm x 75mm - 9szt. (3 saszetki)

Cena: 10,95 pln



Opis słownikowy

Producent	Apteo
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Sterylny pasek w kolorze cielistym przeznaczony do nieinwazyjnego zamykania drobnych ran i cięć, w opakowaniu zawierającym 3 saszetki, po 3 paski w każdej.

Właściwości:

- wytrzymałe
- elastyczne
- łatwe w użyciu
- hipoalergiczny klej
- dobrze przylegają do skóry
- kolor cielisty
- sterylne



Sposób użycia:

1. Oczyszczyć ranę i skórę w jej pobliżu i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Wyciągnąć z saszetki pasek oraz odklejać pojedynczo z papieru ochronnego bezpośrednio przed użyciem.
3. Starannie zbliżyć do siebie brzoży rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
4. Przykleić kilka pasków w odległości około 2-3 mm od siebie.
5. W celu usunięcia paska, odkleić ostrożnie oba końce w kierunku zranionego miejsca.

Środki ostrożności:

Zużyć natychmiast po otwarciu saszetki.

Nie stosować na poważne, głębokie i rozległe rany.

Opatrunek zmieniać co 24 godziny lub jeśli zamoknie.

W przypadku nadmiernego krwawienia z rany, podrażnienia lub zakażenia skóry, pasek należy usunąć.

Przed zastosowaniem u osób chorujących na cukrzycę należy skontaktować się z lekarzem.

W rzadkich przypadkach u dzieci może wystąpić wysypka spowodowana ciepłem lub wilgocią, szczególnie na twarzy. Należy wtedy skontaktować się z lekarzem.

Opakowanie: 9 pasków (3 saszetki) - 6mm x 75mm