

Bobo-test płytkowy test ciążowy do użytku domowego

Cena: 6,90 pln



Opis słownikowy

Producent	Diagnosis
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Płytkowy test Bobo-test to szybki w użyciu i dokładny test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym Bobo-test jest proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 5 minut.

Test można wykonać już po 10 dniach od stosunku.

Nie należy używać testu w przypadku, gdy opakowanie foliowe jest uszkodzone lub minął jego termin przydatności.

Test wyjąć z foliowego opakowania bezpośrednio przed wykonaniem badania.

Zawartość opakowania:

- 1 płytka testowa

- 1 pipetka
- instrukcja użytkowania

Jak wykonać badanie:

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.

- Zebrać próbkę moczu do suchego i czystego pojemnika (nie jest dołączony do zestawu).
- Wyjąć test i pipetkę z foliowej torebki.
- Za pomocą pipetki pobrać próbkę moczu.
- Pipetkę trzymać pionowo ok 1 cm nad okienkiem SAMPLE (S) i umieścić w nim 3-4 krople moczu, uważać żeby nie powstały pęcherzyki powietrza.
- Po upływie 3-5 minut odczytać wynik testu .
- Zużyty test wyrzucić.

Jak interpretować wynik testu:

Wynik pozytywny (ciąża)

W okienku kontrolnym testu (C) i w okienku testowym (T) pojawiły się linie, nie ma znaczenia że któraś z nich będzie mniej wyraźna. Po otrzymaniu wyniku pozytywnego należy się skonsultować z lekarzem, który potwierdzi wynik testu.

Wynik ujemny (brak ciąży)

Linia pojawiła się tylko w okienku kontrolnym (C).

Wynik niejednoznaczny

Wynik jest nieważny kiedy w ciągu 5 minut pojawi się tylko linia w okienku testowym (T) a nie pojawi się w okienku kontrolnym (C) lub kiedy nie pojawi się żadna linia ani w okienku testowym (T) ani w kontrolny (C).

