

Clinell - Uniwersalne chusteczki do dezynfekcji powierzchni 200szt.

Cena: 44,40 pln



Opis słownikowy

Producent	Clinell
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Uniwersalne chusteczki dezynfekcyjne przeznaczone do dezynfekcji i czyszczenia ogólnych powierzchni i sprzętu (np. zabawek, poręczy, telefonów, telewizorów, klawiatur, krzeseł, biurek, umywalk i kranów, wózków inwalidzkich, balkoników, tac na jedzenia, mat do przewijania, klamek) i nieinwazyjnych urządzeń medycznych (sprzęt do radiologii, stetoskopy, mankiety do ciśnieniomierzy, urządzenia EKG, monitory).

Dzięki unikalnej, opatentowanej formule antybakteryjnej chusteczki mogą być wykorzystywane jako środek dezynfekujący lub detergent. Zawierają formułę czwartorzędowych związków amoniowych i polimerowych biguanidów, które działają synergistycznie, każdy w innym mechanizmie, co wpływa na zmniejszenie ryzyka rozwoju oporności bakterii.

Produkt wykazuje działanie bakterio-, wiruso-, prątko- i grzybobójcze, zabijają 99,999% drobnoustrojów, bakterii i wirusów (VRE, bakterie Gram-dodatnich typu MRSA, bakterii Gram-ujemnych - Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Tb, wirusy osłonkowe - HIV, WZW typu B i C, wirusy bezosłonkowe - Norovirus) oraz wiele innych patogenów, zgodnie z europejskimi normami: EN14561, EN14562, EN14563, EN1275, EN14348 oraz EN1276.

Sposób użycia:

Dezynfekcja powierzchni: przeprowadzić ocenę ryzyka i stosując zalecane środki ochrony osobistej, wyjąć chusteczkę z opakowania i dezynfekować zanieczyszczoną powierzchnię wykonując ruch "S" od czystego do brudnego obszaru, nie przecierać dwa razy tego samego obszaru. Gdy chusteczka wyschnie lub się zabrudzi wyrzucić ją do odpowiedniego pojemnika na odpady, a dezynfekowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia.

Dezynfekcja dłoni: pocierać o siebie wewnętrzne strony dłoni, następnie trzymając palce rozłożone przecierać grzbiet każdej dłoni wewnętrzną stroną drugiej dłoni, wewnętrzne strony dłoni, powierzchnię grzbietową palców zgiętymi palcami drugiej dłoni, wykonując obrotowe ruchy pocierać kciuk drugą dłonią. Wykonując ruchy okrężne pocierać opuszki palców wewnętrzną stroną drugiej dłoni zakończyć pocierając każdy nadgarstek wewnętrzną stroną przeciwnej dłoni. Zużyty chusteczkę wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady

Ingredients: Aqua, Surfactant, <1% Cationic Biocides, Preservatives, EDTA, Parfum

Opakowanie: 200 szt

