

# Corega Komfort - krem mocujący do protez zębowych 40g

Cena: 25,25 pln



## Opis słownikowy

Producent	GlaxoSmithKline
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Corega Komfort to krem mocujący, który tworzy aktywowany za pomocą wody żel, zawierający karbomer i karboksymetylocelulozę.

Krem zaczyna natychmiast działać, dzięki czemu zapewnia dziąsłom ochronną warstwę amortyzującą i wygodne mocowanie protezy przez cały dzień.

### Zalety kremu Corega Komfort:

- mocowanie protezy przez cały dzień
- łatwość użycia dzięki precyzyjnej końcówce
- ochrona dziąseł i zapobieganie podrażnieniom

### Jak stosować krem Corega Komfort?

1. Oczyszczyć i osuszyć protezę.
2. Nałożyć produkt zgodnie z instrukcjami - nie za blisko krawędzi protezy.

Proteza górna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska i uzupełnić go dwoma krótszymi paskami na środku protezy.

Proteza dolna: nanieść produkt w postaci jednego długiego paska.

Proteza częściowa: nałożyć dwa krótkie paski produktu.

3. Wypłukać usta przed założeniem protezy.
4. Docisnąć protezę do miejsc z nałożonym kremem mocującym, przytrzymać mocno i zagryźć protezę na kilka sekund.

### Wymywanie protezy:

1. Wypłukać jamę ustną wodą.
2. Powoli, delikatnie kołyszając protezę na boki, wyjąć ją z jamy ustnej.
3. Resztki kremu usunąć z dziąseł i protezy za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki.

Pojemność: 40 g