

Dr Herbich - Pessar kołnierzowy cewki moczowej - jałowy



Cena od: 159,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Herbich Michael
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Ten model pessara jest połączeniem pessara kołnierzowego z miejscowym zgrubieniem zwanym kalotą. W przypadku, gdy kalota jest za wysoka tzn wywiera za duży ucisk na cewkę (co może powodować trudności w oddawaniu moczu), kalotę taką można odpowiednio zmniejszyć przez spłotowanie. Przy pomocy pessara kołnierzowego cewki moczowej leczy się pacjentki z nietrzymaniem moczu powodowanym stresem i/lub z obniżeniem macicy i pochwy (uchyłek pęcherza moczowego). Kalota pessara powinna podnieść do góry cewkę moczową, przesunąć przejście pomiędzy pęcherzem moczowym, a cewką moczową do przodu i jednocześnie do góry i w ten sposób zapobiegać w przypadku obciążenia (np. kaszel, ruch, wysiłek), otwieraniu się górnej części cewki moczowej. Podniesienie przejścia powinno również zapobiegać wnikaniu moczu do cewki moczowej, co dodatkowo wspiera leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu oraz tzw. mniejszej formy nietrzymania moczu na skutek stresu i wysiłku. Prawidłowo dopasowany pessar może pomóc w ocenie czy operacja usunięcia macicy z plastyką pochwy przyniesie oczekiwany efekt. Przy wyjmowaniu należy kalotę przesunąć palcem wskazującym na bok, przez co pessar będzie łatwiejszy do wyjęcia. Pessar nie może być za duży. lub za mały aby odpowiednio spełniał swoją rolę.

Uwaga: Pessar może być stosowany tylko przez jedną pacjentkę!

Pessar co 4 tygodnie wyjąć w celu sprawdzenia ścian pochwy, a następnie po wymyciu założyć u tej samej pacjentki wg uznania lekarza prowadzącego w sposób gwarantujący zasady higieny.

Wymiary: średnica od 55 do 85 mm (co 5 mm)