

Dr Herbich - Pessar talerzowy - jałowy



Cena od: 159,90 pln

Opis słownikowy

Producent	Herbich Michael
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pessar talerzowy stosuje się przy lekkich obniżeniach macicy i pochwy lub przy silnym obniżeniu macicy i pochwy z wypadaniem po uprzednim operacyjnym zmniejszeniu wejścia do pochwy. Przy większym wypadaniu pęcherza pessar podtrzymuje także w części środkowej i bocznej uszkodzenie pochwy. W sposób prosty może być zakładany zarówno przez lekarza jak i samodzielnie używany przez przeszkoloną pacjentkę. Pacjentka młodsza może samodzielnie co 4 tygodnie i/lub po każdym stosunku wg uznania wyjąć pessar na noc, wymyć go i następnego dnia ponownie włożyć, lub nie wyjmować a pochwę wypłukać przy pomocy irygatora. Kontrola lekarska wskazana jest co 4 tygodnie. U starszych pacjentek zaleca się wizytę u lekarza co 4-6 tygodni. We wziernikach należy sprawdzić stany zapalne, używać np. kremu lub czopka z zawartością estrogenów.

Uwaga: Pessar może być stosowany tylko przez jedną pacjentkę!

Pessar co 4 tygodnie wyjąć w celu sprawdzenia ścian pochwy, a następnie po wymyciu założyć u tej samej pacjentki wg uznania lekarza prowadzącego w sposób gwarantujący zasady higieny.

Wymiary: średnica od 55 do 90 mm (co 5 mm)