


Duża mata do akupresury z poduszką 110x42cm

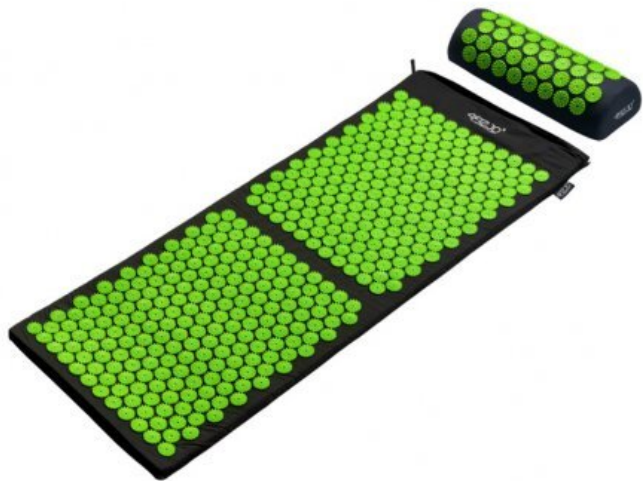

Cena: 142,00 pln

Opis słownikowy

Producent	4FIZJO
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Mata dostępna w różnych kolorach. Kolor do wysyłki wybierany jest losowo spośród dostępnych w magazynie. W przypadku chęci ustalenia dostępnego koloru maty, przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Duża mata do akupresury 4FIZJO to wyrób medyczny o właściwościach antyalergicznym (wszystkie użyte elementy są antyalergiczne). Posiada ona 13188 kolców, na poduszce jest ich 2142. Na każdej rozetce są 42 kolce, jest to dwukrotnie większa ilość niż w standardowych matach.

Kolce znajdujące się na macie, poprzez ucisk wybranych rejonów ciała, wpływają na poprawę ukrwienia mięśni doprowadzając do ich szybszej regeneracji oraz do wydzielania się poprawiających nastrój endorfin, które wpływają na działanie neuropeptydów - cząsteczek których zadaniem jest uśmierzenie bólu. Kolce i tworzywa, z których wykonane są maty do akupresury zostały przetestowane i mogą być używane bezpośrednio na gołą skórę.

Dolegliwości, przy których ma zastosowanie mata:

- stres, bezsenność, depresja
- bóle: głowy, szyi, barków, pleców, kręgosłupa
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- rwa kulszowa
- neuralgie
- słabe krążenie
- napięcie mięśniowe

Użytkowanie maty:

Czas używania maty uzależniony jest od poziomu zaawansowania użytkownika:

- Początkujący 5 - 10 minut

- Średniozaawansowany 10 - 20 minut
- Zaawansowany 20 - 40 minut

Czas można systematycznie zmieniać po przystosowywaniu się do niej. Początkowo użytkownik może odczuwać dyskomfort, jednak po pewnym czasie stasowania zauważalne powinno być zwiększenie krążenia krwi. Zaleca się korzystanie z maty codziennie.

Używanie maty najlepiej rozpocząć od położenia się na niej bez ubrania lub np. w cienkiej koszulce. Można jej używać nie tylko w pozycji leżącej, ale także poprzez stanie na niej lub siedzenie.

Pielęgnacja i przechowywanie:

Wykonany z wysokiej jakości czystej bawełny pokrowiec posiada rozetki z kolcami i jest w pełni zdejmowalny, co pozwala zadbać o czystość i higienę maty, dzięki taśmie wentylującej jest on dodatkowo przewiewny, dzięki czemu mata pozostaje świeża i nie zatęchnie. Posiada on wygodny uchwyt.

Materiały użyte do produkcji mat to najwyższej jakości surowce zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

Matę należy przechowywać w dopasowanej torbie przewoźnej, przy zwijaniu kolce były powinny być skierowane na zewnątrz, aby uniknąć ich zużycia.

Produkt myć ręcznie letnią wodą z mydłem. Dokładnie wypłukać i wysuszyć. Unikać używania pralki lub suszarki, ponieważ mogą uszkodzić grzbiety.

Przeciwwskazania:

Maty nie powinno się stosować w przypadku cierpienia na zaburzenie krzepliwości (hemofilia), stosowania leków przeciwzakrzepowych (np. Clexane, Heparin) lub jeśli ma się wrażliwą skórę, uskarża się na dolegliwości skórne, po których użycie maty mogłoby przynieść negatywne skutki.

Korzyści płynące z użytkowania maty:

- zmniejszenie bólu pleców, bioder, głowy, uczucia zmęczenia
- rozluźnienie mięśni
- poprawa jakości snu
- zapewnienie poczucia głębokiego relaksu
- zwiększenie krążenia krwi i energii witalnej

Charakterystyka maty:

Długość: 110 cm
Szerokość: 42 cm
Grubość: 2 cm
Materiał: naturalna bawełna
Wymiary poduszki: 39x14x10 cm

Charakterystyka rozet:

Ilość rozet z kolcami: 314
Ilość kolców na rozetce: 42
Ilość rozet na poduszce: 51
Materiał: kolce - ABS

Produkt zarejestrowany został w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co daje użytkownikowi pewność, że korzystanie z nich jest w pełni bezpieczne.