


Hartmann Atrauman Ag opatrunek do leczenia ran zakażonych 10 x 20cm, 10szt

Cena: 299,00 pln

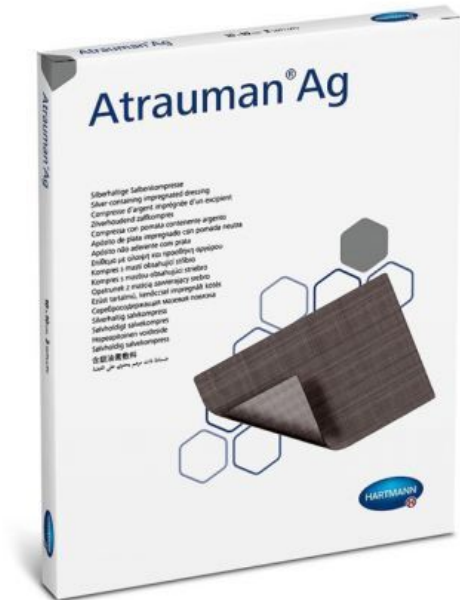

Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	HARTMANN
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Zastosowanie

Do miejscowego leczenia ran zakażonych, zarówno przewlekłych jak i ostrych, oparzeń do 2 stopnia, ran objętych krytyczną kolonizacją bakteryjną oraz jako środek w zapobieganiu infekcjom podczas leczenia ran, szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym. Opatrunek jest typową warstwą kontaktową i powinien być przykryty wtórnym opatrunkiem chłonnym. W zależności od rodzaju rany można zastosować dowolnie wybrany opatrunek wtórny, jak np. TenderWet active, PermaFoam, Sorbalgon, Zetuvit czy zwykły kompres gazowy.

Charakterystyka

- Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierający srebro metaliczne;
- Hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów (tłuszczów obojętnych);
- Pod wpływem wydzieliny z rany opatrunek uwalnia jony srebra o bakteriobójczym działaniu;
- Atrauman Ag zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA.
- Warstwa zewnętrzna materiału nośnego oraz maść zapobiegają przyklejaniu się opatrunku do rany, dzięki czemu daje się on

bezboleśnie zmieniać;

- Maść pielęgnuje brzegi rany i zapewnia ich elastyczność;
- Dzięki temu, że opatrunek jest cienki, miękki i łatwy do układania, zapewniony jest jego dobry kontakt z podłożem rany;
- Charakteryzuje się wysokim stopniem przepuszczalności dla powietrza i pary wodnej a także dla wydzieliny rany;
- Przy zmianie opatrunku na ranie nie pozostają trudne do usunięcia resztki maści (jak np. wazelina);
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Rozmiar: 10 x 20cm, 10szt