


## Igły NovoFine (Novo Nordisk) 30G 0,30 x 8mm - 7 szt.

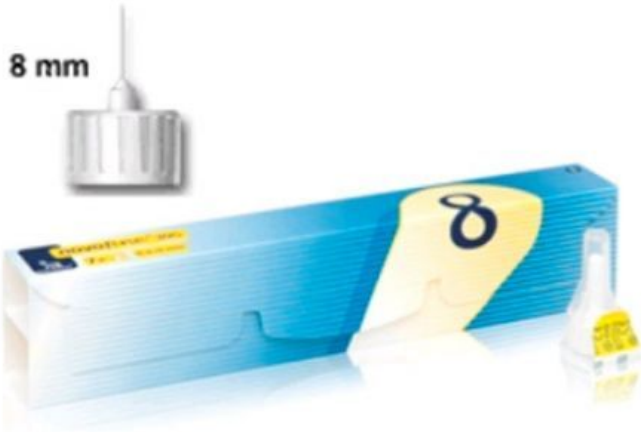

Cena: 7,28 pln

### Opis słownikowy

Opakowanie	7 szt.
Producent	Novonordisk
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Igły **NovoFine®** stanowią integralną część systemu do podawania insuliny firmy Novo Nordisk i mogą być używane do wszystkich wstrzykiwaczy firmy **Novo Nordisk** NovoPen® 4 oraz NovoPen® Junior.

Rozmiar: **30G, 0,30 x 8mm**

Opakowaniu: 7 szt.

Liczba 30G określa grubość igły (im wskaźnik wyższy, tym igła cieńsza), a liczba 8mm oznacza ich długość. Badania naukowe wykazały, że wstrzyknięcia insuliny igłami o długości 8mm lub 6mm, przy użyciu właściwej techniki podania insuliny zapewniają dostanie się insuliny do warstwy podskórnej, właściwej dla prawidłowego wchłaniania insuliny.

W produkcji igieł NovoFine® wykorzystywana jest najnowocześniejsza technologia, zapewniająca doskonałość ostatecznego produktu. Technologia "cienkiej ścianki" pozwala na redukcję oporów przy przepływie insuliny. Łatwość wkłucia igieł NovoFine® zwiększa zastosowanie powłoki silikonowej, redukującej opory powstające przy przebijaniu skóry.

Pamiętaj, że wszystkie igły NovoFine® są jednorazowego użytku! Po wykonaniu wstrzyknięcia powinny być usunięte, a do kolejnego zastrzyku należy założyć nową igłę. Kilkakrotne użycie tej samej igły może powodować:

- odczuwanie bólu przy wkłuciu,
- infekcje,
- zniszczenia naskórka,
- blokowanie przepływu insuliny (na skutek krystalizacji insuliny wstrzykiwanej poprzednio tą samą igłą).

Pamiętaj, aby po wstrzyknięciu insuliny odkręcić zużytą igłę! Pozostawienie nieodkręconej igły na urządzeniu do podawania insuliny po wykonanym wstrzyknięciu, może powodować wyciek insuliny lub dostanie się powietrza do zbiornika z insuliną.