

# JOYDIVISION Tampony bezsznureczkowe Soft-Tampons normal - 10szt.



Cena: 42,90 pln

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 szt.
Producent	JoyDivision

## Opis produktu

Bezsznureczkowe miękkie tampony Soft-Tampons normal to gąbki menstruacyjne sprawdzające się podczas miesiączki, kiedy nie trzeba rezygnować z aktywności takich jak korzystania z sauny, pływanie, sport i seks.

Tampon ma kształt serca i zwęża się ku końcowi gąbki, natomiast dwa rozsunięte skrzydła u podstawy tworzą pustą przestrzeń na spodzie, w której po ściśnięciu umieszcza się palec podczas aplikacji.

Każda gąbka pakowana jest pojedynczo a wysokie opakowanie zbiorcze ułatwia wyjęcie 1 tamponu.



## Właściwości:

- nie podrażniający ciała, higieniczny materiał
- dyskretne i wygodne
- ergonomiczny kształt
- łatwe w aplikacji i usuwaniu
- bezpieczne w użytkowaniu
- testowane dermatologicznie i klinicznie
- nie zawiera lateksu
- elastyczny materiał dopasowuje się do kobiecej anatomii

Tampon wykonany z różowego, miękkiego medycznego materiału gąbkowego (poliuretan) który nie zawiera substancji chemicznych. Pianka posiada certyfikat OEKO-TEX i oznaczenie STANDARD 100, co zapewnia o przebadaniu pod kątem obecności szkodliwych substancji.

Soft-Tampons nie jest środkiem antykoncepcyjnym.

Należy pamiętać o usunięciu ostatniego tamponu pod koniec menstruacji.

Gąbka menstruacyjna jest produktem jednorazowego użytku, wielokrotne stosowanie może prowadzić do infekcji.

#### Instrukcja aplikacji:

1. Przed aplikacją umyć ręce.
2. Wyjąć tampon z opakowania.
3. W celu ułatwienia włożenia, nałożyć na suchy tampon odrobinę żelu nawilżającego lub czystej zwilżyć go czystą wodą. Przed włożeniem należy z tamponu wycisnąć wodę aby utrzymał maksymalną chłonność.
4. Przyjąć optymalną pozycję: usiąść na sedesie lub przykucnąć.
5. Tampon chwycić z boku dwoma palcami (kciukiem i palcem środkowym) i ścisnąć go, ściśnięcie spowoduje utworzenie na spodzie gąbki wgłębienia na palec, które ułatwi wprowadzenie tamponu aż do szyjki macicy.

Zaleca się wymianę tamponu co 4-6 godzin jednak czas noszenia tamponu należy dostosować do okresu: w cięższe dni zaleca się zmianę po 3-5 godzinach, w słabsze dni około 5-8 godzin. Maksymalny czas pozostawienia tamponu w pochwie wynosi 8 godzin.

Tampon należy wymienić natychmiast po odbyciu stosunku płciowego bez prezerwatywy.

#### Instrukcja wyjmowania:

1. Umyć ręce.
2. Przyjąć optymalną pozycję do usuwania tamponu, najlepiej przykucnąć z szeroko rozstawionymi nogami (w pozycji kucznej długość pochwy ulega zmniejszeniu).
3. Chwycić tampon jednym palcem za uchwyt w kształcie klapki i go wyciągnąć.

Jeśli tamponu nie uda się usunąć można zostawić go nieco dłużej i poczekać aż się prawidłowo wchłonie (łatwiej usuwa się w pełni wchłoniętą gąbkę). Pomocna może być relaksująca kąpiel lub przysiad i mocne pchanie (tak jak przy wypróżnieniu) co może pomóc w stopniowym zsunięciu gąbki w dół pochwy do momentu gdy uda się ją chwycić i wyciągnąć. Jeśli to nie pomoże należy udać się do ginekologa.

#### Tampony Soft-Tampons znane są również jako:

- *Sport-Tampons* - brak sznureczka nie przeszkadza podczas uprawiania sportu i nie powoduje nieprzyjemnych otarć
- *Tampon pływacki* - miękki tampon nie puchnie, jest dyskretny i niezauważalny.
- *Sauna&Spa-Tampon* - gąbka bez sznureczka zapewnia najwyższą dyskrecję, tampon optymalny do stosowania w saunie i w salonach SPA.
- *Sex-Tampon* - miękki materiał nie jest wyczuwalny przez partnera i zapobiega wyciekowi krwi menstruacyjnej.

**Opakowanie:** 10 sztuk

Szerokość w najszerszym miejscu: 5 cm

Długość: 5,5 cm

Wysokość: 2 cm

