

Kanjo Silver Line XXL - podnośnik wannowy z tapicerką antybakteryjną

Cena: 3 650,00 pln

Opis słownikowy

Producent	DIETZ
Rejestracja	Wyrób medyczny
Zastosowanie	ułatwienia w łazience



Opis produktu

UWAGA: Zamówienie realizujemy wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

Podnośnik Kanjo Silver Line XXL zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas kąpieli.

Podnośnik zawiera cząsteczki srebra, co wpływa na zwiększenie ochrony skóry i zapewnia jej ochronę antybakteryjną.

- Pasuje do większości wanien
- Łatwy w obsłudze (mały i poręczny pilot)
- Odchylane oparcie (40 stopni)
- Przyjazny dla skóry (antypoślizgowa powłoka)
- Stabilny
- Składany - łatwe przechowywanie
- Czas ładowania baterii - 1h

KANJO to podnośnik, ułatwiający opuszczanie i podnoszenie osoby biorącej kąpiel w wannie. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i

ułatwienie kąpieli zarówno użytkownikowi, jak i jego opiekunowi. To zasilany w pełni akumulatorowo, samodzielny podnośnik, niewymagający żadnej dodatkowej instalacji hydraulicznej ani elektrycznej, którego można używać zarówno w domu, jak i w różnego rodzaju instytucjach.

Podnośnik wannowy można złożyć do niewielkich rozmiarów i rozłożyć na dwie części, co ułatwia jego przenoszenie, transport i przechowywanie. Podnośnik KANJO można łatwo umieścić w każdej standardowej wannie (Uwaga! istnieje kilka bardzo wąskich i wyprofilowanych typów wanien, do

których podnośnik nie jest przystosowany – szczegółowe informacje na temat kompatybilnych rozmiarów wanien można znaleźć w części „Dane techniczne”).

Rama umieszczona jest na czterech nogach z przyssawkami, które można obracać, by dostosować podstawę do zaokrąglonego dna wanny.

Zintegrowane uchwyty do wyciągania przy przyssawkach oraz system tylnego zwalniania umożliwiają proste wyjęcie podnośnika KANJO z wanny.

Dane techniczne (rysunek 11):

Ciężar całkowity bez pilota: 10,5 kg

Ciężar siedziska: 6,8 kg

Ciężar oparcia: 3,7 kg

Ciężar pilota: 0,3/0,4 kg

Głębokość siedziska (A): 500 mm

Maks. głębokość siedziska (B) 455 mm

Min. wysokość siedziska: 65 mm

Głębokość całkowita (przy wyprostowanym oparciu) (C): 690 mm

Głębokość całkowita (przy opuszczonym oparciu) (C): 900 mm

Wysokość całkowita (D): 1105 mm

Wysokość oparcia (E): 680 mm

Szerokość oparcia (F): 350 mm

Szerokość siedziska ze skrzydełkami bocznymi (G): 710 mm

Szerokość siedziska bez skrzydełek bocznych: 375 mm

Rozmiar podstawy: 530 x 220 mm

Maks. odchylenie oparcia: 40°

Udźwig: do 170 kg

Stopień ochrony silownika przed wodą: IP66

Stopień ochrony pilota przed wodą: IP67

Czas pracy: 10% / 2 min - 90% / 18 min

Napięcie zasilania KANJO / KANJO Premium: 11,1 V / 14,8 V

Natężenie robocze KANJO / KANJO Premium: 5A / 5A

Akumulator: Li-ion

Czas ładowania przy niskim poziomie naładowania KANJO/KANJO Premium: 5h/1h

Poziom hałas: Od / Do 49db(A) / 47db(A)

Parametry wanien / podnośników wannowych (rysunek 4):

A - długość dna wanny: >800mm

B - szerokość dna wanny (odległość między przyssawkami): 280-610mm

C - szerokość wanny na wysokości 8 cm (podstawa): >420mm

D - wysokość wanny z regulacją maks. 2 cm (akcesoria): <455mm

E - szerokość wanny na górze (zewnętrzna): <710mm

F - szerokość wanny na górze (wewnętrzna): <630mm

Medpunkt