

# Kompres błyskawiczny TOP FROST suchy lód 18 x 13,5cm



Cena: 4,55 pln

## Opis słownikowy

Producent	AKZENTA
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Okład samochłodzący TOP FROST do stosowania przy udzielaniu pierwszej pomocy. Kompres błyskawiczny pomaga zredukować i zmniejszyć ból i opuchliznę, przynosi ulgę w warunkach wymagających zimnej terapii.

Produkt jest odpowiedni do stosowania przy:

- gorączce
- bólach głowy
- siniakach
- napięciu mięśni
- stłuczeniach
- niewielkich oparzeniach

Przechowywać w apteczce i zabierać ze sobą na wyjazdy, pikniki, kempingi i inne aktywności wykonywane na zewnątrz.

Sposób użycia:

1. Nacisnąć worek obiema rękami w celu uwolnienia wewnętrznego pęcherzyka wody i zainicjowania reakcji między pęcherzykiem wody a związkami soli azotowej.
2. Potrząsnąć okładem w celu osiągnięcia maksymalnego schłodzenia, zmieszania zawartości torebki i wywołania reakcji endotermicznej, obniżającej temperaturę do  $-5^{\circ}\text{C}$ .
3. Przyłożyć kompres do miejsca urazu.

Worek zewnętrzny wykonany jest z włókniny z potrójnym zgrzewaniem, co zapewnia wysoką odporność, przechowywanie w chłodni i nieprzepuszczalność. Włóknina chroni nadwrażliwe strefy nadmiernego odczucia chłodu.

Produkt chroniony patentem.

Mieszanka soli azotowej zgodna z normą UE CE 1907/2006

Jest to produkt jednorazowego użytku.

Nie należy go otwierać ani stawiać na nim ostrych i ciężkich przedmiotów.

Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Nie zamrażać.

Rozmiar: 18 x 13,5 cm