

Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem dla dorosłych

Cena: 6,20 pln

Opis słownikowy

Producent	Nieokreślony
Rejestracja	Wyrób medyczny



Opis produktu

Maseczka tlenowa z nebulizatorem i drenem.

Przeznaczenie:

maseczka przeznaczona jest do terapii inhalatorowej.

W skład zestawu wchodzi jedna maseczka + nebulizator + dren.

Rozmiar: dla dorosłych L

Długość drenu: 2,10m

Instrukcja użytkowania:

1. Odkręcić nakrętkę nebulizatora i włączyć do niego przepisany przez lekarza środek, po czym złożyć nebulizator.
2. Otwór wylotowy nebulizatora połączyć z maską.
3. Jeden koniec drenu podłączyć do nebulizatora, a drugi do źródła sprężonego powietrza lub tlenu.
4. Maskę przyłożyć do twarzy i postępować według zaleceń lekarza.