

# MediQuick alkoholowy preparat do dezynfekcji 5L



Cena: 129,00 pln

## Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Pojemność	5L
Producent	Rheosol
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych powierzchni wyrobów medycznych w ekonomicznym opakowaniu przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Preparat nie wymaga rozcieńczenia i może stanowić uzupełnienie mniejszych butelek ze spryskiwaczem.

Znajduje zastosowanie w dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni medycznych takich jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny, łóżka oraz inne trudno dostępne powierzchnie sprzętu medycznego. Zalecany do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. szkło, aluminium, stal nierdzewna, metal, czy ceramika.

### Cechy:

Gotowy do użycia.

Na bazie mieszaniny alkoholi.

Szerokie spektrum biobójcze: jest bakteriobójczy, prątkobójczy, drożdżakobójczy oraz wirusobójczy.

Krótki czas działania – już w 30 sekund

Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową.

Przebadany dermatologicznie, delikatny i nieszkodliwy dla skóry.

Po zastosowaniu szybko schnie, nie pozostawia żadnych smug.

Wygodny, łatwy w aplikacji i rozprowadzaniu, może być używany poprzez rozpylenie lub z pomocą ściereczki.

Posiada delikatny, przyjemny zapach.

### Skuteczność i działanie biobójcze:

- bakteriobójcze – 30 sek.;

- przeciwko prątkom gruźlicy: *M.terrae* – 5 min.;

- drożdżakobójcze – 1 min.;

- aktywność wobec wirusów: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min.

Preparat do użytku profesjonalnego. Wyrób medyczny kl. II a, CE 0481

**Użytkowanie:**

Preparat nanieść na czyste powierzchnie przy użyciu ściereczki lub poprzez spryskiwanie bezpośrednio na dezynfekowaną powierzchnię.

Dezynfekowana powierzchnia powinna być dokładnie zwilżona i pozostawiona do wyschnięcia przez czas min. 30 sekund (w zależności od wymaganego spektrum biobójczego i zalecanego czasu ekspozycji)

Przed zastosowaniem środka należy zapoznać się z etykietą i ulotką informacyjną produktu.

**Skład:** 100 g płynu zawiera: 25,9 g etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide

**Pojemność:** 5 L