

## NoseFrida aspirator do nosa



Cena: 28,10 pln

### Opis słownikowy

Producent	Fridababy
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

Prosty i bezpieczny w użyciu, zaprojektowany przez laryngologa i pediatrów aspirator do nosa odpowiedni dla dzieci od pierwszego dnia życia.

Według przeprowadzonych badań higieniczny jednorazowy filtr zapobiega przenoszeniu bakterii i śluzu.

Nie zawiera BPA (szkodliwy związek organiczny z grupy bisfenoli stosowany w tworzywach sztucznych).

#### Stosowanie:

Włożyć jednorazowy filtr, umieścić większą rurkę na nozdrzu dziecka (nie wpychać), aby zamknąć otwór.

Użyj czerwonego ustnika, aby odessać śluz.

Aby uzyskać lepsze ssanie można zwilżyć błony śluzowe.

#### Czyszczenie:

Po każdym użyciu wyrzucić jednorazowy filtr.

Dużą rurkę ssącą umyć wodą z mydłem.

Cienką rurkę ssącą wyczyścić kilkoma kroplami środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol.

Po wysuszeniu, złączyć mocno razem i włożyć nowy filtr do kolejnego wykorzystania.

#### Środki ostrożności:

Używać wyłącznie do odsysania nosa – nie używać do ssania uszu lub szyi.

Nie wdychać powietrza do ustnika, gdy rurka ssąca znajduje się w pobliżu nozdrzy dziecka.

Nie podłączać do żadnych urządzeń elektrycznych.

Rurki ssącej nie wolno wciskać do wnętrza nosa dziecka.

Wyrób nie jest zabawką, należy go trzymać poza zasięgiem dzieci.

