

OneCare ściereczki inkontynencyjne do krocza z kremem barierowym 25szt.



Cena: 13,20 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Opakowanie | 25 szt. |
| Producent | KAF GRUP |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Ściereczki inkontynencyjne do krocza i okolic intymnych z dodatkiem kremu barierowego zapewniające użytkownikom kompleksową pielęgnację i tworzące na skórze warstwę ochronną przed czynnikami zewnętrznymi.

Produkt odpowiedni do stosowania podczas mycia i pielęgnacji pacjentów intensywnej opieki medycznej, obłożnie chorych oraz ze specjalnymi potrzebami lub o ograniczonej mobilności, które z różnych przyczyn nie mogą brać kąpeli.

Sposób użycia:

Otworzyć opakowanie.

Stosować poprzez przecieranie konkretnych części ciała. Do każdej części ciała używać innej ściereczki.

Produkt jednorazowy o właściwościach myjących i pielęgnujących. Nie wymaga sputkiwania. Przed i po użyciu nie łączyć z innymi środkami do mycia.

Ściereczki odpowiednie do każdego rodzaju skóry.

W celu zwiększenia komfortu użytkowania, produkt przed użyciem można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Włożyć opakowanie do mikrofalówki, zostawić na 20 sekund przy mocy 700W. Sprawdzić temperaturę ściereczki. Nie podgrzewać w temperaturze wyższej niż 35-40°C.

Nie używać gdy opakowanie jest uszkodzone. Nie stosować na rany. Nie stosować jako tampon. Unikać kontaktu

U dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących stosować pod kontrolą lekarza.

Przechowywać z dala od dzieci.

Skład: woda, fosfolipidy, dimetikon, gliceryna, EDTA, kwas cytrynowy, polisorbata 20, fenoksyeatanol, glikol kaprylowy.

Klasa: wyrób medyczny kl. I

pH: 5.5

Opakowanie: 25 sztuk

