

ORLIMAN One Plus Orteza (stabilizator) stawu skokowego (duże rozmiary) OPL490



Cena od: 237,00 pln

Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | Orliman |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Wykonana z trzywarstwowego, elastycznego przepuszczalnego dla ciepła i wilgoci materiału orteza stawu skokowego. Zawiera dwie wyprofilowane anatomicznie wkładki boczne oraz nieelastyczną taśmę korekcyjną. W okolicy pięty jest wykończona miękkim materiałem, nie powodującym podrażnień i otarć.

Może być dopasowywana do różnych etapów leczenia i rodzajów urazów stawu, oferuje różne poziomy stabilizacji i ograniczenia zakresu ruchów w zależności od rodzaju użytych komponentów składowych oraz ich połączenia i zlokalizowania

Ortezę można również dopasowywać do różnej budowy anatomicznej oraz w przypadku dużej dysproporcji w wielkości dalszej części podudzia

Zalecenia:

- leczenie pooperacyjne i pourazowe
- chroniczna niestabilność stawu
- słabość więzadeł
- prewencja przeciążeń marszowych
- skręcenia

Działanie:

Orteza stabilizuje i wspiera staw skokowego i sąsiednie struktury tkankowe oraz ogranicza zakres ruchu w stawie

skokowym pozostawiając palce wolne.

Zakładanie:

1. Rozluźnić taśmy usytuowane w przedniej części ortezy, odpinając w tym celu zapięcia micro-velcro.
2. Wsunąć stopę do stabilizatora, upewniając się przy tym, że pięta została prawidłowo umieszczona w przeznaczonym na nią tylnym otworze.
3. Naciągnąć i przymocować taśmy aby zapewnić mocne i wygodne dopasowanie. Zakładanie sztywnej dzianinowej taśmy korekcyjnej: przymocować końcówkę taśmy (wyposażoną w metalową sprzączkę) w części podeszwowej ortezy na wysokości śródstopia, przeciągnąć ją w górę wokół podbicia ku stronie przyśrodkowej lub bocznej (w celu ograniczenia ruchu pronacji lub supinacji). Następnie, po jej owinięciu od tyłu wokół kończyny powyżej stawu skokowego, przymocować ją na ortezie. Aby wyregulować naciągnięcie taśmy należy odpiąć jej przeciągniętą przez sprzączkę końcówkę z zapięciem micro-velcro, odpowiednio ją naciągnąć i ponownie przymocować.
4. W celu skrócenia długości taśmy dociągowej, uwalniamy końcówkę z zapięciem micro-velcro/rzepem i przycinamy materiał do wymaganej długości. Należy upewnić się, że taśma została przeciągnięta w kierunku odpowiadającym leczonej niestabilności stawu skokowego: bocznej lub przyśrodkowej.

Orteza dostępna w rozmiarach od 1 do 3.

| Rozmiar | Obwód (cm) |
|---------|------------|
| 1 | 23-26 |
| 2 | 26-29 |
| 3 | 29-32 |

Ortezę powinna dobrać odpowiednio wykwalifikowana osoba, stosując się do wymiarów podanych w tabeli rozmiarowej. Za duży ucisk może powodować utrudnienia w krążeniu i wpłynąć na zaburzenie pracy mięśni. Producent zaleca regulować ucisk do uzyskania uczucia optymalnego przylegania ortezy do ciała.

Kolor: czarny (OPL490)