

# ORTHOCLEAN Płyn do czyszczenia aparatów ortodontycznych 300ml



Cena: 23,30 pln

## Opis słownikowy

Pojemność	300ml
Producent	CHEMA RZESZÓW
Rejestracja	Wyrób medyczny

## Opis produktu

Płyn ORTHOCLEAN przeznaczony do oczyszczania ruchomych aparatów ortodontycznych odpowiedni do codziennego stosowania.

Odpowiednio dobrana formuła preparatu zapewnia bezpieczną i efektywną pielęgnację ruchomych aparatów ortodontycznych. Płyn umożliwia skuteczne usuwanie nagromadzonej warstwy osadów i przebarwienia.

### Sposób użycia:

10-20 ml płynu wlać do ½ szklanki ciepłej wody.

Do płynu włożyć aparat, tak aby w całości był zanurzony w płynie.

Pozostawić aparat w roztworze na 5-20 minut.

Wyjąć aparat z roztworu i opłukać pod bieżącą wodą.

**Skład:** woda oczyszczona, kwas cytrynowy, kwas ortofosforowy, bromek benzalkoniowy.

**Pojemność:** 300 ml