

Otovent aparat do leczenia ujemnego ciśnienia w uchu środkowym

Cena: 57,09 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Producent | ABIGO Medical |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Otovent jest to klinicznie potwierdzony sposób leczenia ujemnego ciśnienia w uchu środkowym, który pomaga uniknąć chirurgicznego zabiegu zakładania rurek wentylacyjnych w błonie bębenkowej ucha pacjenta.

Zasada działania polega na tym, że dziecko napełnia balon medyczny powietrzem wdmuchiwanym przez nos. Wyrównuje w ten sposób ciśnienie i łagodzi objawy ze strony uchu środkowym.

Dzieci mogą używać zestawu Otovent w domu pod nadzorem rodziców.

Leczenie jest bezbolesne, bez efektów ubocznych i zajmuje niewiele czasu.

Otovent należy stosować 2-3 razy dziennie, aż do całkowitego usunięcia płynu wysiękowego z ucha środkowego.

Jak korzystać z zestawu Otovent

- Podłączyć balon do końcówki nosowej. Prawą ręką mocno docisnąć okrągłą część końcówki nosowej do prawego otworu nosowego. Palcami lewej ręki zatkać lewy przewód nosowy. Przycisnąć skrzydełko nosa z lewej strony w taki sposób by szczelnie zatkać lewy przewód nosowy.

- Głęboko wciągnąć powietrze i zamknąć usta. Nadmuchać balon prawym otworem nosowym, aż osiągnie rozmiar grejpfruta.

- Powtórzyć procedurę dla lewego otworu nosowego.

Leczenie jest skuteczne, gdy dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.

Jeśli dziecko nie odczuwa żadnej zmiany w uchu:

- Należy powtórzyć punkt 2, przechylając głowę lekko do przodu, a następnie w prawo. (patrz film powyżej)

- Powtórzyć punkt 3.

- Gdy balon zostanie nadmuchany szczelnie docisnąć końcówkę nosową do otworu nosowego i przełknąć ślinę. Powietrze z balonu będzie uchodzić wstecznie w kierunku nosa.

Leczenie jest skuteczne, jeśli dziecko odczuwa wzrost ciśnienia i / lub „kliknięcie” w uchu.



Uwaga !

Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. (wtedy ciśnienie do przedmuchiwania trąbek słuchowych jest skuteczne)