

# Oxivir Sporicide Wipe chusteczki do dezynfekcji powierzchni 80szt

Cena: 49,90 pln



## Opis słownikowy

Dystrybutor	MEDILAB
Opakowanie	80 szt.
Producent	Diversey
Rejestracja	Produkt biobójczy, Wyrób medyczny

## Opis produktu

Oxivir Sporicide Wipe to preparat myjąco dezynfekujący do twardych, wodoodpornych powierzchni. Dzięki swojej formule opartej na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru) preparat jest skuteczny wobec patogenów takich jak: Clostridium difficile i Bacillus subtilis.

### Cechy:

- Pełne spektrum mikrobiologiczne – preparat posiada potwierdzone działanie sporobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżakobójcze oraz grzybiczbójcze
- Aktywność sporobójcza (C. difficile) już w 1 minutę w warunkach czystych
- Substancja aktywna (nadtlenek wodoru) rozkłada się na tlen i wodę i nie odkłada się na powierzchniach dzięki czemu nie dochodzi do narastania oporności bakterii
- Idealnie nadaje się do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych i położniczych, sal pacjentów, izolatek- preparat zapewnia tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom
- Idealnie nadaje się do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych występujących na powierzchniach
- Nie wymaga sputkiwania

- Nie zawiera substancji zapachowych i barwiących
- Nie zawiera chloru oraz alkoholu
- Nie podrażnia dróg oddechowych

#### Skuteczność mikrobójcza:

Działanie bakteriobójcze, w tym: MRSA, VISA, VRSA, VRE

Grzybobójcze w tym: Candida albicans

Wirusobójcze w tym: adenowirus, rotawirus, poliwirus, norowirus, MNV, wirus RSV (wirus syncytialny), HBV, HIV, H1N1

Sporobójcze w tym: Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis

Prątkobójcze (prątki gruźlicy)

Mykobakteriobójcze

#### Sposób użycia:

Otworzyć opakowanie, wyciągnąć z niego chusteczkę i zamknąć opakowanie. Chusteczką przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię, upewnić się że jest dobrze zwilżona przez wymagany czas kontaktu i pozostawić do wyschnięcia. gdy jest to konieczne zmienić chusteczkę na nową.

#### Kompatybilność materiałowa:

Chusteczki Oxivir Sporocide Wipe używane zgodnie z zaleceniami producenta są odpowiednie do użycia na większości powierzchni. Nie stosować do czyszczenia powierzchni wrażliwych na działanie wody i kwasów (np. marmur czy kamień).

#### Skład preparatu:

Nadtlenek wodoru (70 g/kg), anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), kwas glikolowy (15 g/kg).

Pojemność: 80 chusteczek

pH roztworu: ok 3

Rozmiar chusteczki: 20 x 30 cm

Materiał: polipropylen

Gramatura: 25 g/m<sup>2</sup>