

Pessar kostkowy perforowany - Dr. Arabin

Cena od: 185,00 pln



Opis słownikowy

Producent	Dr Arabin
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Pessar kostkowy perforowany z guzikiem – stosowany przy różnych stopniach obniżenia pochwy i macicy. Efekt podciśnienia pozwala na lepszą stabilność pessara. Pessar stosowany także do rozluźnienia zrostów i zwężeń pochwy oraz by leczyć kłopoty z oddawaniem moczu. Dodatkowo może być stosowany przed operacjami likwidującymi wypadanie pochwy i/lub macicy, wraz z estrogenami podawanymi dopochwowo, aby poprawić krążenie tkankowe. Przydatny w badaniu urodynamicznym w celu repozycji obniżonego narządu rodnego.

Do korekcji wypadania zwykle stosuje się mniejsze rozmiary. W przypadku zwężonej pochwy najczęściej wskazane są większe pessary. U Pacjentki z izolowanym wypadaniem macicy mały pessar będzie zakładany do górnej (dalszej) części pochwy. W przypadku dodatkowo występującego wypadania pęcherza i jelita większy pessar powinien być umiejscowiony mniej więcej w środku.

Dlaczego warto wybierać Pessary Dr. Arabin?

- Biokompatybilny silikon – pessary poddane testom na bezpieczeństwo dla organizmu Pacjenteń oraz brak reakcji drażniących i uczulających.
- Materiał wykonania – miękki, elastyczny silikon, ułatwiający sprawną obsługę z pessarem.
- Szeroki wybór rodzajów pessarów – możliwość doboru do konkretnego przypadku zaburzenia.
- Najszerszy wybór rozmiarów pessarów położniczych na rynku.
- Produkcja niemiecka.